

ゴア® バイアバーン® VBX バルーン拡張型ステントグラフト



Sizing Table



ゴア® バイアバーン® VBX バルーン拡張型ステントグラフト サイジング表

ステント グラフト径¹ (mm)	装填時 ステント グラフト長¹ (mm)	イントロ デュース サイズ (Fr)	最低拡張圧			推奨拡張圧 (NP)			最大拡張圧 (RBP)			ステントグラフト全長を 最大拡張径まで拡張させた時³	
			最低 拡張圧 (atm)	最終 ステント グラフト 内径 (mm)	ステント グラフト長² (mm)	推奨 拡張圧 (atm)	最終 ステント グラフト 内径 (mm)	ステント グラフト長² (mm)	最大 拡張圧 (atm)	最終 ステント グラフト 内径 (mm)	ステント グラフト長² (mm)	ステント グラフト 最大拡張径 (mm)	ステント グラフト長² (mm)
6	29	7	7	5.2	28.1	13	6.0	27.5	15	6.2	27.3	8	24.3
	39	7	7	5.0	38.1	14	6.0	37.4	15	6.1	37.3	8	33.3
	59	7	7	5.1	58.2	14	6.0	57.5	15	6.1	57.4	8	52.3
	79	7	7	5.3	77.6	12	6.0	77.0	15	6.3	76.7	8	73.6
7	29	7	5	5.9	28.0	11	7.0	27.3	15	7.4	26.8	11	19.4
	39	7	6	6.0	37.9	12	7.0	37.0	15	7.3	36.5	11	26.6
	59	7	6	6.0	57.8	12	7.0	57.1	15	7.3	56.7	11	46.9
	79	7	6	6.0	78.0	14	7.0	77.3	15	7.1	77.2	11	68.1
8	29	7	6	7.0	27.5	12	8.0	26.9	13	8.1	26.8	11	23.7
	39	7	6	6.7	37.1	12	8.0	36.2	13	8.1	36.1	11	30.0
	59	7	6	6.8	56.9	12	8.0	56.1	13	8.1	56.0	11	47.3
8L	59	8	5	6.7	58.4	11	8.0	59.4	13	8.3	59.7	16	44.1
	79	8	5	6.7	78.5	12	8.0	79.3	13	8.1	79.4	16	58.6
10	29	8	5	8.7	25.7	10	10.0	25.4	13	10.4	25.2	13	19.1
	39	8	6	8.8	35.7	11	9.9	35.4	13	10.2	35.3	13	31.1
	59	8	5	8.6	55.5	11	10.0	55.3	13	10.3	55.2	13	44.6
	79	8	5	8.6	75.7	11	10.0	76.1	13	10.3	76.2	13	68.4
11	29	8	5	9.0	26.6	10	10.9	25.7	12	11.4	25.4	16	17.8
	39	8	5	9.4	35.5	11	11.0	34.7	12	11.2	34.6	16	25.8
	59	8	5	9.5	55.7	10	11.0	54.9	12	11.4	54.5	16	42.8
	79	8	5	9.5	74.3	10	11.0	73.9	12	11.5	73.7	16	60.6

1 公称値

2 理想的な in vitro 条件での記載になっているため、一般的指針として使用してください。

3 ステントグラフト径を超えて追加拡張する際に追加の PTA/バルーンカテーテルが必要になります。(本製品に追加の PTA/バルーンは含まれていません。)

販 売 名:ゴア® バイアバーン® VBX バルーン拡張型ステントグラフト
 承認番号:22900BZX00309000
 一般的名称:ヘパリン使用中心循環系ステントグラフト

ゴア®, GORE®, VBX®, バイアバーン®, VIABAHN®, および記載のデザイン(ロゴ)は、
 W. L. Gore & Associates の商標です。
 ©2018 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア株式会社
 AW0358-JA1 JUNE 2018



製造元

W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

製造販売元

日本ゴア株式会社

メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075

東京都港区港南 1-8-15 Wビル

Tel : 03-6746-2560

Fax : 03-6746-2561

gore.co.jp