



留置手順

ゴア® エクスクルーダー® C3デリバリーシステムの挿入

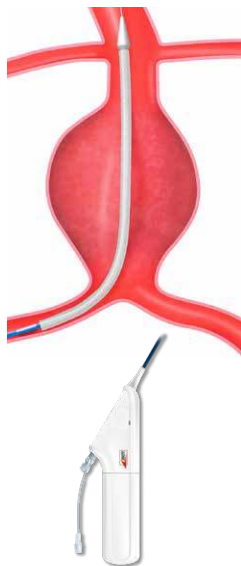


メインボディ中枢側の展開

- プロキシマルディプロイメントノブを反時計回りに 90 度回し引っ張る。

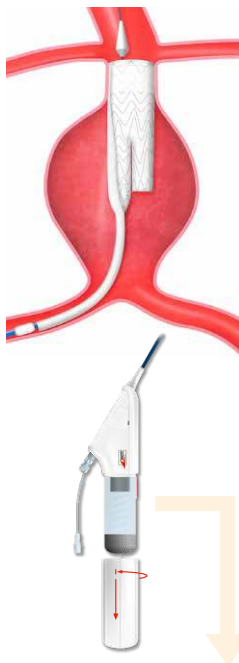


コントララテラル・ゲートへの カニューレション

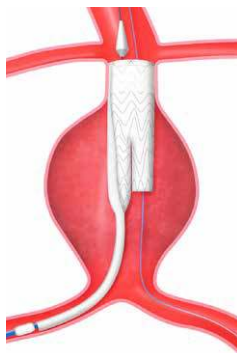


コンストレイニングシステム (拘束 / 再展開システム) の抜去

- セーフティロックをスライドさせクリアーノブを反時計回りに 90 度回し、引っ張る。

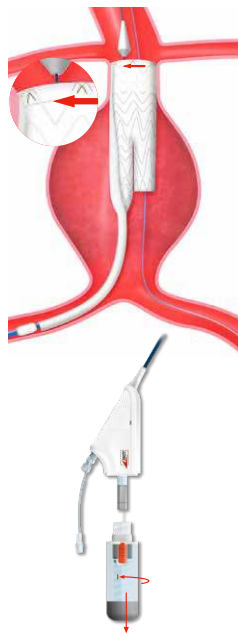

メインボディ同側脚の展開


- ディスタルディプロイメントノブを緩め、引っ張る。

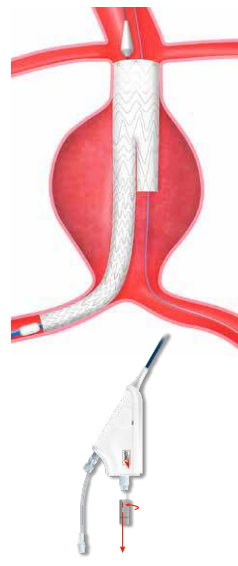


メインボディ中枢側留置位置の再調整 (オプション)

メインボディ中枢側を拘束する

- コンストレイニングダイヤルを時計回りに回す。

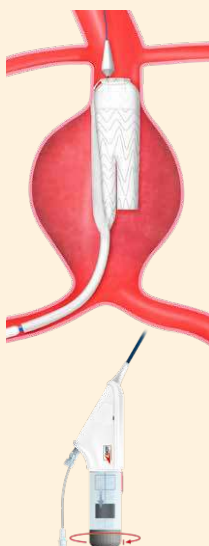


メインボディ中枢側留置位置を 再調整する

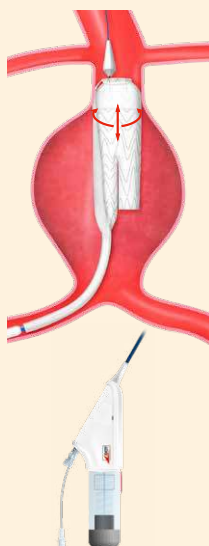


メインボディ中枢側の再展開

- コンストレイニングダイヤルを反時計回りに回す。

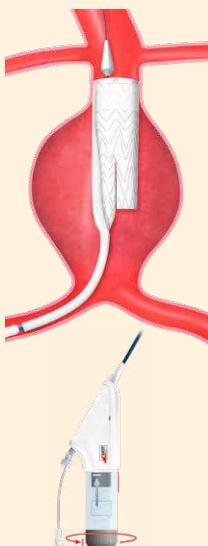

ゴア® エクスクルーダー® C3デリバリーシステム カテーテル

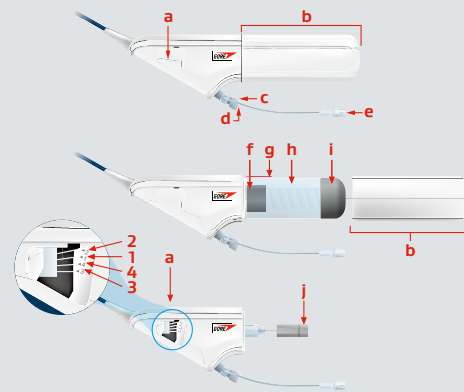

- a. 展開ラインアクセスハッチ
- b. プロキシマルディプロイメントノブ
- c. Tuohy - Borst バルブ
- d. ガイドワイヤールーメン
- e. フラッシュポート
- f. コンストレイニングナット
- g. セーフティロック
- h. クリアーノブ
- i. コンストレイニングダイヤル
- j. ディスタルディプロイメントノブ

展開ラインアクセスハッチ (a)

1. プロキシマルディプロイメントライン
2. ロックピン
3. コンストレイニンググループ
4. ディスタルディプロイメントライン

販売名：エクスクルーダー®Y字型ステントグラフトシステム 承認番号：21900BZY00011000 一般名称：大動脈用ステントグラフト
ゴア、GORE、Together, improving life、エクスクルーダー、EXCLUDERおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
© 2023 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 231035825-JA JUNE 2023

「添ナビ」アプリで
電子添文を
ご参照ください

メインボディ

その他



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

