



GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis

PERFORMANCE by design


Sequência de implantação

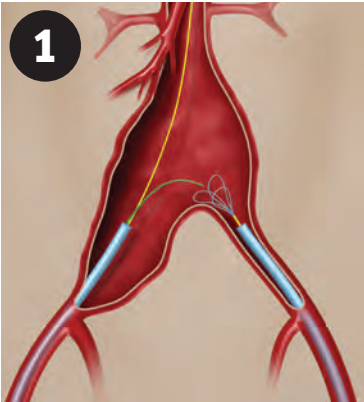


Estabeleça as bainhas e os passa-fios utilizando a técnica do laço.

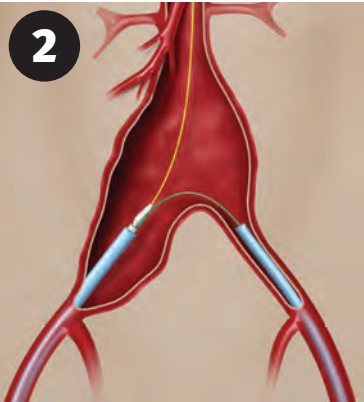


Empurre o Componente para ramos ilíacos, pelo lado do tratamento, através dos dois fios da GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis.

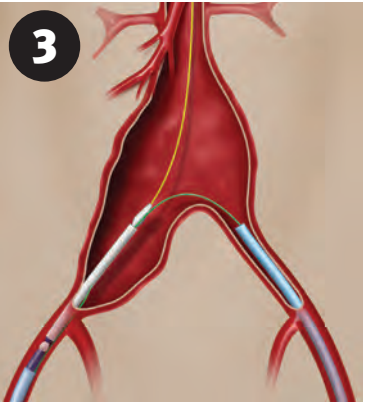


Retire a bainha abaixo do GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis e alinhe o anel do marcador radiopaco acima do óstio ilíaco interno.

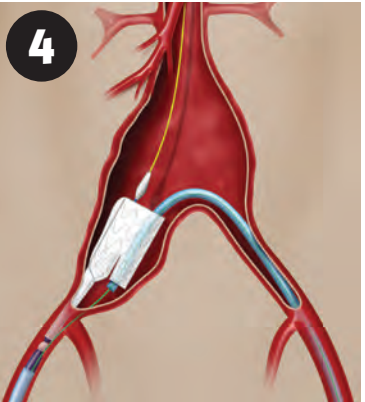


Implante o Componente para ramos ilíacos (puxe o puxador branco do mandril de liberação externo) e avance a bainha flexível de 12 Fr x 45 cm por cima da bifurcação e para dentro da entrada ilíaca interna.

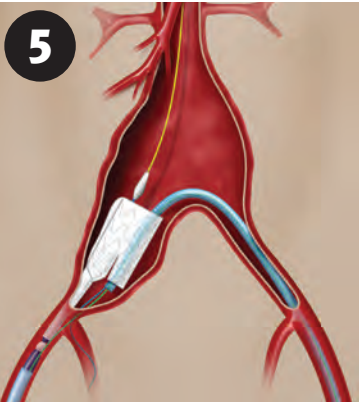


Canular a artéria ilíaca interna com o terceiro fio-guia. O componente para ramos ilíacos parcialmente implantado pode ser reposicionado: 1) girando-o a até 90° em qualquer direção, ou 2) movendo-o distalmente, para facilitar o acesso à artéria ilíaca interna.

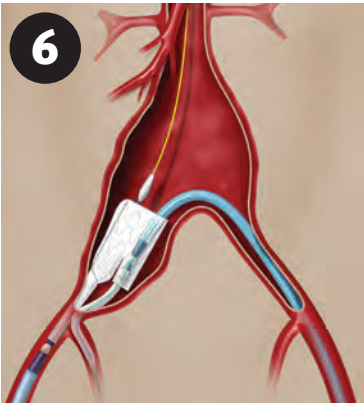

Empurre o componente ilíaco interno e alinhe o marcador radiopaco curto do Componente ilíaco interno com o marcador radiopaco longo do Componente para ramos ilíacos.

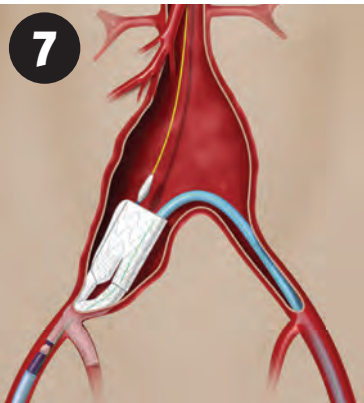

Implante o Componente ilíaco interno e sobreponha com o Componente para ramos ilíacos e encaixe dentro da artéria ilíaca. Remova o passa-fios.

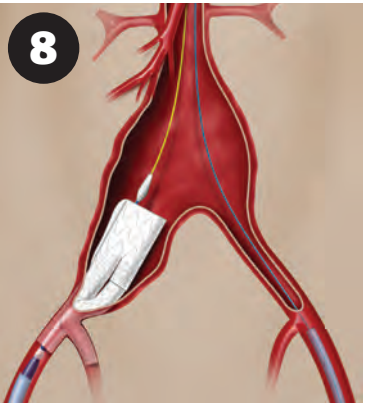

Implante a parte ilíaca externa do Componente para ramos ilíacos (puxe o mandril de liberação interno cinza).






Troque a bainha flexível 12 Fr por uma bainha 18 Fr. Avance e implante a Endoprótese tronco principal do GORE® EXCLUDER® Device.




Avance e implante a extremidade contralateral de 23 ou 27 mm de diâmetro como componente de ponte.

Implantação em etapas

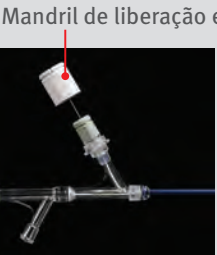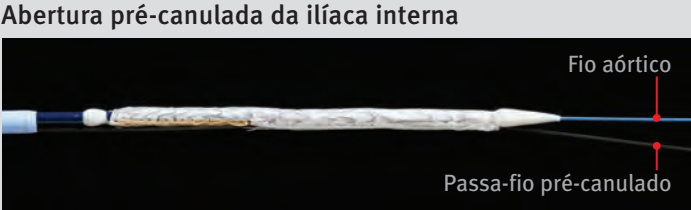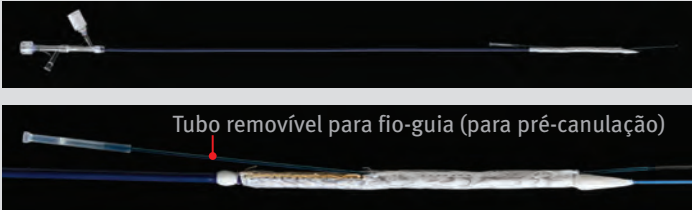

Etapa 1: Implantação reposicionável

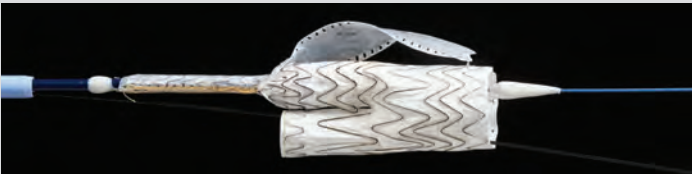

Etapa 2: Dispositivo totalmente implantado



GORE® EXCLUDER®

Iliac Branch Endoprosthesis

Guia de tamanhos

Endoprótese tronco principal				
DIÂMETRO AÓR-TICO INTERNO PRETENDIDO (mm)	DIÂMETRO DA EXTREMIDADE AÓRTICA (mm)	COMPRIMENTOS (mm)	DIÂMETRO PRETEN-DIDO DO VASO ILÍACO (mm)	DIÂMETRO DA EXTREMIDADE ILÍACA (mm)
19–21	23	12 / 14 / 16 / 18	10–11 / 12–13,5	12 / 14,5
22–23	26	12 / 14 / 16 / 18	10–11 / 12–13,5	12 / 14,5
24–26	28,5	12 / 14 / 16 / 18	10–11 / 12–13,5	12 / 14,5
27–29	31	13 / 15 / 17	12–13,5	14,5
30–32	35	14 / 16 / 18	12–13,5	14,5
Componente para ramos ilíacos				
DIÂMETRO PRETENDIDO DO VASO ILÍACO EXTERNO (mm)		DIÂMETRO DA EXTREMIDADE ILÍACA (mm)	COMPRIMENTO DO COMPONENTE PARA RAMOS ILÍACOS (cm)	
6,5–9		10	10	
10–11		12	10	
12–13,5		14,5	10	
Componente para ilíaca interna				
DIÂMETRO PRETENDIDO DO VASO ILÍACO INTERNO (mm)		DIÂMETRO DA EXTREMIDADE ILÍACA (mm)	COMPRIMENTO DO COMPONENTE ILÍACO INTERNO (cm)	
6,5–9		10	7	
10–11		12	7	
12–13,5		14,5	7	
Endoprótese com extremidade contralateral ¹				
DIÂMETRO PRETENDIDO DO VASO ILÍACO (mm)	DIÂMETRO DA EXTREMIDADE ILÍACA (mm)	COMPRIMENTOS DA EXTREMIDADE CONTRALATERAL (cm)	COMPRIMENTO LATERAL TOTAL DA ENDOPRÓTESE PARA RAMOS ILÍACOS QUANDO INSERIDA EM TRONCOS DE 31 mm (cm)	COMPRIMENTO LATERAL TOTAL DA ENDOPRÓTESE PARA RAMOS ILÍACOS QUANDO INSERIDA EM TRONCOS DE 35 mm (cm)
17–21,5	23	10 / 12 / 14	16,5 / 18,5 / 20,5	17,5 / 19,5 / 21,5
> 21,5	27	10 / 12 / 14	16,5 / 18,5 / 20,5	17,5 / 19,5 / 21,5
DIÂMETRO PROXIMAL DA ENDOPRÓTESE TRONCO PRINCIPAL (mm)			COMPRIMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO DA RENAL-ATÉ-ILÍACA INTERNA (cm)	
23, 26, 28,5			16,5	
31			17,5	
35			18,5	
DIÂMETRO PROXIMAL DA ENDOPRÓTESE TRONCO PRINCIPAL (mm)		EXTREMIDADE CONTRALATERAL DE 23 MM ² COMPRIMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO DA RENAL-ATÉ-ILÍACA INTERNA (cm)	EXTREMIDADE CONTRALATERAL DE 27 MM ³ COMPRIMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO DA RENAL-ATÉ-ILÍACA INTERNA (cm)	
23, 26, 28,5		19,5	20,5	
31		20,5	21,5	
35		21,5	22,5	

¹ Para uso da Endoprótese com extremidade contralateral como extensão ilíaca, consulte o formulário de seleção da medição/dispositivo GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis: www.goremedical.com/excluder/caseprep/
² A extensão mínima da extremidade contralateral de 23 mm é de 5 cm devido à zona cônica distal.
³ A extensão mínima da extremidade contralateral de 27 mm é de 6 cm devido à zona cônica distal.

Dispositivos auxiliares Gore recomendados

GORE® DrySeal Sheath with Hydrophilic Coating		GORE® Tri-Lobe Balloon Catheter	
CÓDIGO DO PRODUTO	TAMANHO DA BAINHA (Fr)	CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO INTERNO DO VASO (mm)
DSL1228	12	BCM1634	16–34
DSL1628	16		
DSL1828	18		

Todas as bainhas têm 28 cm de comprimento.

 Consult Instructions for Use


W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asia Pacific) 800.437.8181 (United States)
00800.6334.4673 (Europe) 928.779.2771 (United States)

goremedical.com

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

GORE®, EXCLUDER®, PERFORMANCE BY DESIGN, and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates.
© 2013, 2014 W. L. Gore & Associates, Inc. AS0370-PT2 APRIL 2014

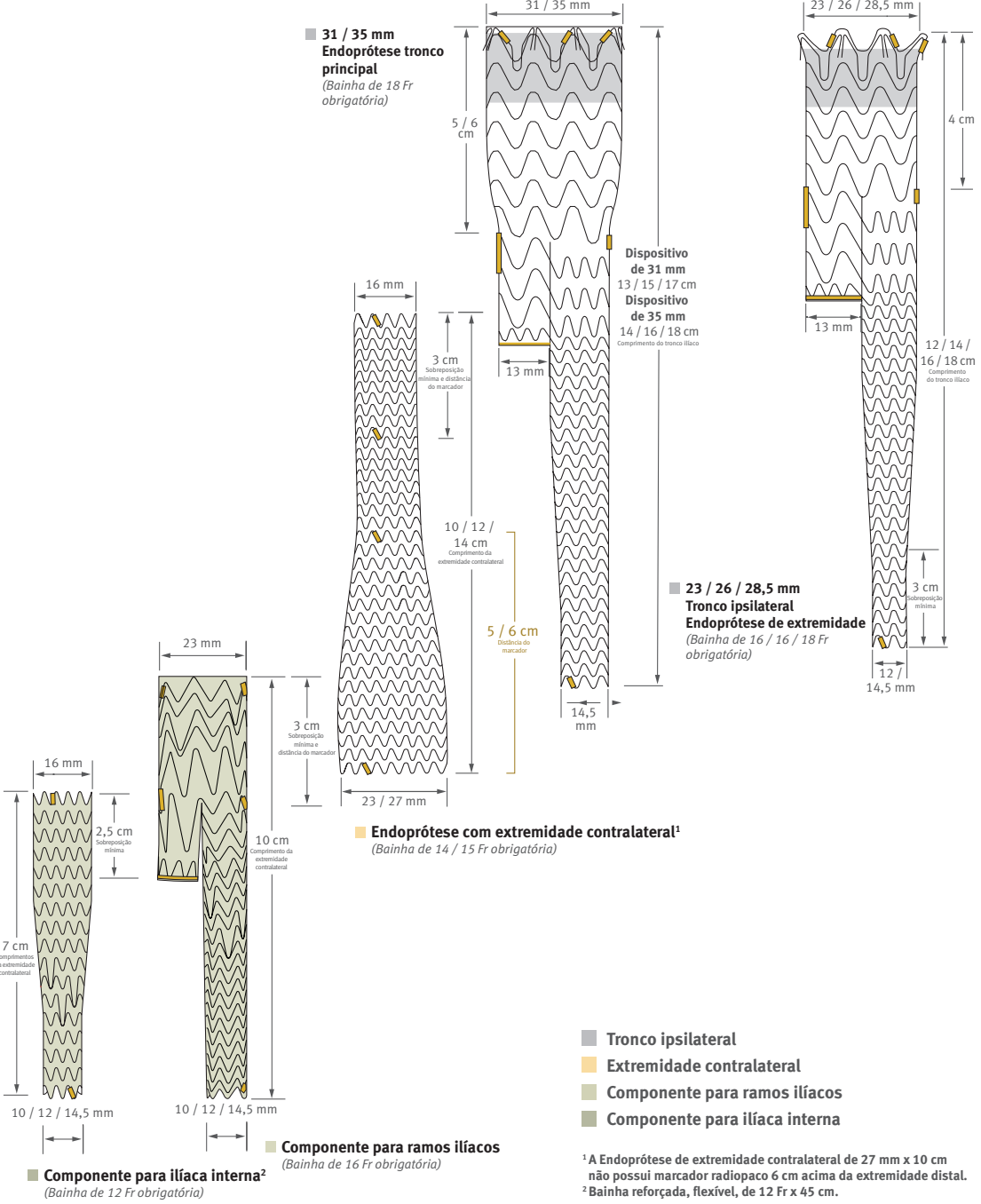

Lista de verificação de acessórios recomendados[†]

- 1 — Bainha introdutora de 12 Fr
- 1 — Bainha introdutora de 12, 14, 15, 17 ou 18 Fr^{††}
- 2 — Fios-guia superstiff de 0,035", 145 cm ou mais longos
- 1 — Cateter marcador pigtail
- 1 — Balão aórtico (do tamanho adequado)
- 1 — Balão PTA 14 mm x 4 cm
- Cateteres e fios de acesso diversos
- Bainha reforçada, flexível de 12 Fr x 45 cm
- Kits de catéter-laço
- Balões PTA correspondentes às recomendações
- GORE® EXCLUDER® Device Aortic Extender
- GORE® EXCLUDER® Device Iliac Extender
- GORE® EXCLUDER® Contralateral Leg Endoprosthesis 12, 14,5, 16, 18 ou 20

[†] Lista de verificação mínima

^{††} Uma bainha introdutora adicional de 14, 15 ou 18 Fr é necessária para utilização em extremidades contralaterais de maior diâmetro

