


Reposicionamento

o futuro do EVAR

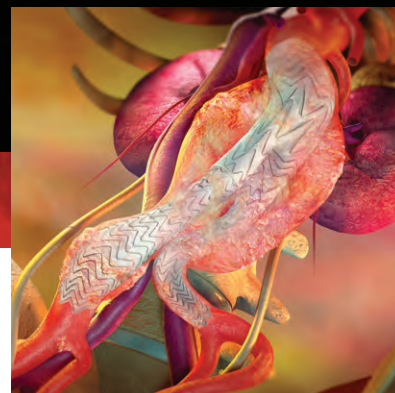

PERFORMANCE by design



Novo
**BAIXO
PERFIL**

ExcluderC3.com



EXCLUDER®

AAA ENDOPROSTHESIS

Design incomparável



Dados


Apoiado por dados clínicos e comerciais aprofundados

- Dados clínicos prospectivos e controlados a cinco anos (N = 565)
- Dados provenientes de experiência mundial durante um período de quinze anos (159 000 dispositivos distribuídos)

Design comprovado pelo decorrer do tempo, apoiado por 15 anos de evolução

- 1 **Construção sem suturas**
 - Tecnologia da prótese de ePTFE em superfícies luminais e abluminais
- 2 **Design de stent sinusoidal avançado**
 - Melhora a flexibilidade e a conformabilidade a longo prazo
- 3 **Camadas de película de ePTFE exclusivas**
 - Baixa permeabilidade com propriedades de resistência a abrasão
 - Conformabilidade em anatomias tortuosas
- 4 **Membrana de vedação**
 - Construída para proporcionar segurança contra fugas intra-aneurismais
- 5 **Fixação infra-renal ativa**
 - São construídas âncoras para uma fixação activa para proporcionar resistência à migração

Durabilidade e desempenho

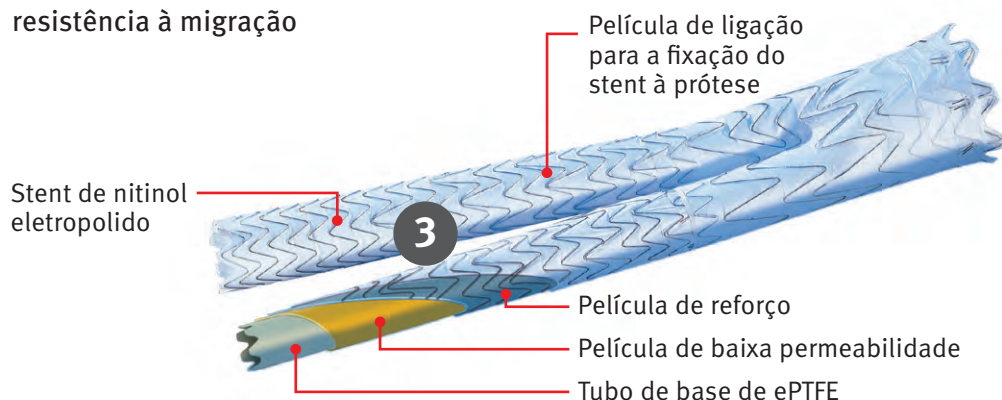




Uso intuitivo

Dispositivo GORE® EXCLUDER® sempre foi conhecido pela sua liberação e expansão elegantemente simples.

O sistema de entrega GORE® C3® permite que a prótese seja reposicionada e também em manter o médico focado na anatomia do doente e na endoprótese.

Esta expansão simples em três fases, aplica uma série de três rotações de 90° no sentido anti-horário e puxões para expandir a prótese. O design discreto destes botões de expansão ajuda a assegurar uma sequência intuitivamente simples

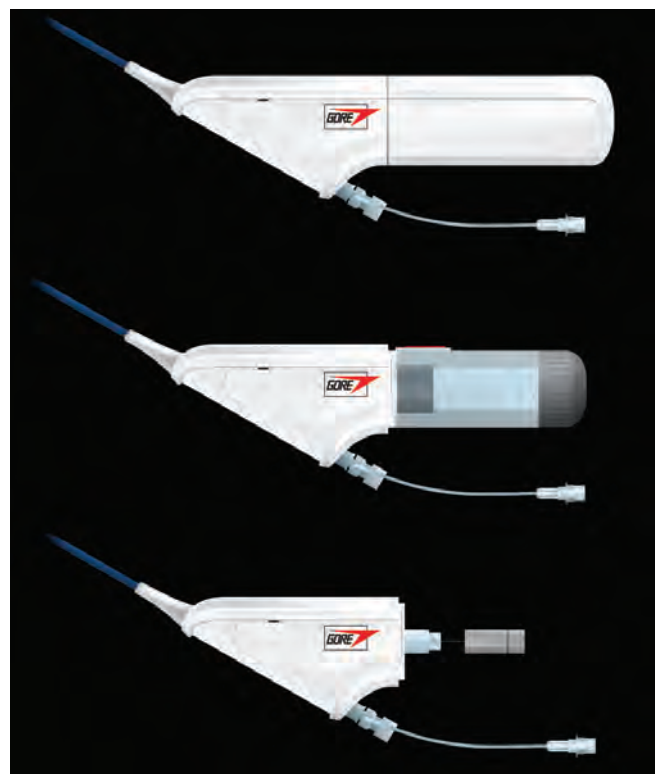

Sistema de entrega GORE® C3®

Portfólio expandido



Agora disponível

Tronco principal de 35 mm

- Expande o intervalo do diâmetro de tratamento do colo aórtico para 19 mm a 32 mm*
- Design de baixo perfil de 18 Fr
- Extensão aórtica de 36 mm também disponível



Contralaterais de 23 mm e 27 mm

- Expande o intervalo do diâmetro de tratamento ilíaco para 8 mm a 25 mm
- Bainha introdutora de 14 Fr a 15 Fr compatível
- Disponível em comprimentos de 10 cm, 12 cm e 14 cm



* Baseado em medições de parede interna a parede interna, intervalo de tratamento do colo aórtico equivalente a dispositivos concorrentes de 36 mm.

Comparação de perfil nas contralaterais de 16 mm



Novo perfil mais baixo, o mesmo dispositivo comprovado


**Sem alterações
no implante**

- O mesmo dispositivo comprovado
- A mesma facilidade de utilização
- A mesma metodologia de expansão

**Propriedades da manga
de perfil mais baixo**

- Foi aplicado o processo de fabricação exclusivo da Gore para aumentar a resistência da manga
- A manga permite que o dispositivo seja fixado em um diâmetro menor e estreito

Redução do perfil

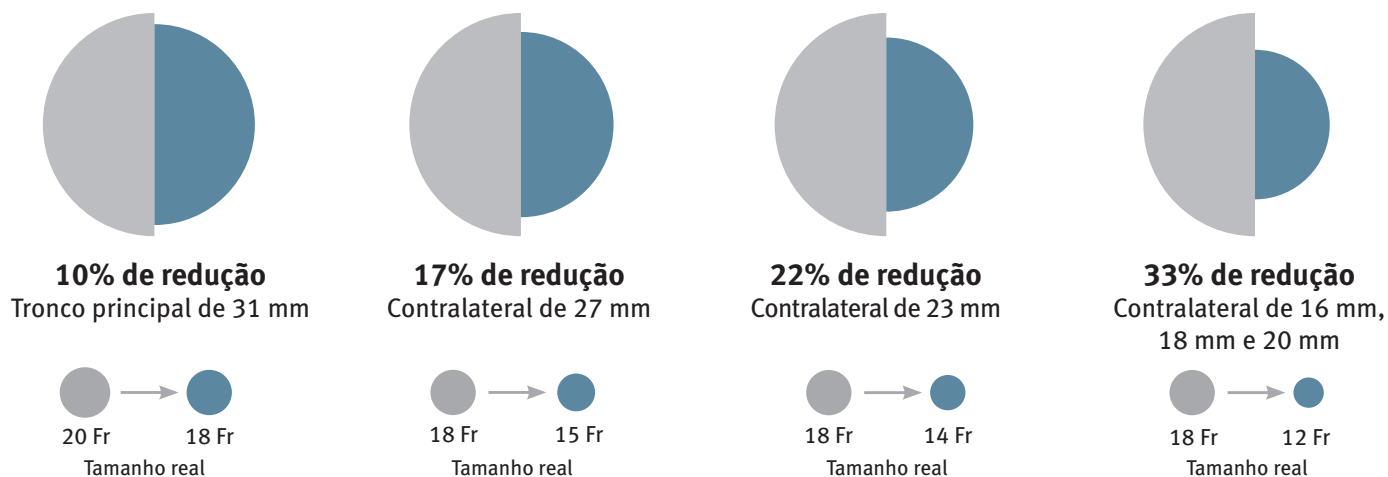

Extremidade ipsilateral e tronco da endoprótese

REFERÊNCIA DO SISTEMA DE ENTREGA ORIGINAL	REFERÊNCIA DO SISTEMA DE ENTREGA GORE® C3®	DIÂMETRO INTERNO AÓRTICO PRETENDIDO (mm)	DIÂMETRO DA ENDOPRÓTESE AÓRTICA (mm)	DIÂMETRO INTERNO ILÍACO PRETENDIDO (mm)	DIÂMETRO DA ENDOPRÓTESE ILÍACA (mm)	COMPRIMENTO GERAL DO DISPOSITIVO (cm)	TAMANHO RECOMENDADO DA BAINHA (Fr)
PXT231212	RMT231212	19–21	23	10–11	12	12	18
PXT231214	RMT231214	19–21	23	10–11	12	14	18
PXT231216	RMT231216	19–21	23	10–11	12	16	18
PXT231218	RMT231218	19–21	23	10–11	12	18	18
PXT231412	RMT231412	19–21	23	12–13,5	14,5	12	18
PXT231414	RMT231414	19–21	23	12–13,5	14,5	14	18
PXT231416	RMT231416	19–21	23	12–13,5	14,5	16	18
PXT231418	RMT231418	19–21	23	12–13,5	14,5	18	18
PXT261212	RMT261212	22–23	26	10–11	12	12	18
PXT261214	RMT261214	22–23	26	10–11	12	14	18
PXT261216	RMT261216	22–23	26	10–11	12	16	18
PXT261218	RMT261218	22–23	26	10–11	12	18	18
PXT261412	RMT261412	22–23	26	12–13,5	14,5	12	18
PXT261414	RMT261414	22–23	26	12–13,5	14,5	14	18
PXT261416	RMT261416	22–23	26	12–13,5	14,5	16	18
PXT261418	RMT261418	22–23	26	12–13,5	14,5	18	18
PXT281212	RMT281212	24–26	28,5	10–11	12	12	18
PXT281214	RMT281214	24–26	28,5	10–11	12	14	18
PXT281216	RMT281216	24–26	28,5	10–11	12	16	18
PXT281218	RMT281218	24–26	28,5	10–11	12	18	18
PXT281412	RMT281412	24–26	28,5	12–13,5	14,5	12	18
PXT281414	RMT281414	24–26	28,5	12–13,5	14,5	14	18
PXT281416	RMT281416	24–26	28,5	12–13,5	14,5	16	18
PXT281418	RMT281418	24–26	28,5	12–13,5	14,5	18	18
N/A	NOVO! RLT311413	27–29	31	12–13,5	14,5	13	18
N/A	NOVO! RLT311415	27–29	31	12–13,5	14,5	15	18
N/A	NOVO! RLT311417	27–29	31	12–13,5	14,5	17	18
N/A	NOVO! RLT351414	30–32	35	12–13,5	14,5	14	18
N/A	NOVO! RLT351416	30–32	35	12–13,5	14,5	16	18
N/A	NOVO! RLT351418	30–32	35	12–13,5	14,5	18	18

Extremidade contralateral da endoprótese

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERNO ILÍACO PRETENDIDO (mm)	DIÂMETRO DA ENDOPRÓTESE ILÍACA (mm)	COMPRIMENTO DA EXTREMIDADE CONTRALATERAL (cm)	TAMANHO RECOMENDADO DA BAINHA (Fr)
PXC121000	10–11	12	10	12
PXC121200	10–11	12	12	12
PXC121400	10–11	12	14	12
PXC141000	12–13,5	14,5	10	12
PXC141200	12–13,5	14,5	12	12
PXC141400	12–13,5	14,5	14	12
NOVO! PLC161000*	13,5–14,5	16	9,5	12
NOVO! PLC161200*	13,5–14,5	16	11,5	12
NOVO! PLC161400*	13,5–14,5	16	13,5	12
NOVO! PLC181000*	14,5–16,5	18	9,5	12
NOVO! PLC181200*	14,5–16,5	18	11,5	12
NOVO! PLC181400*	14,5–16,5	18	13,5	12
NOVO! PLC201000*	16,5–18,5	20	9,5	12
NOVO! PLC201200*	16,5–18,5	20	11,5	12
NOVO! PLC201400*	16,5–18,5	20	13,5	12
NOVO! PLC231000*	18,5–21,5	23	10	14
NOVO! PLC231200*	18,5–21,5	23	12	14
NOVO! PLC231400*	18,5–21,5	23	14	14
NOVO! PLC271000*	21,5–25,0	27	10	15
NOVO! PLC271200*	21,5–25,0	27	12	15
NOVO! PLC271400*	21,5–25,0	27	14	15

Extensão ilíaca da endoprótese

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERNO ILÍACO PRETENDIDO (mm)	DIÂMETRO DA ENDOPRÓTESE (mm)	COMPRIMENTO DA ENDOPRÓTESE (cm)	TAMANHO RECOMENDADO DA BAINHA (Fr)
PXL161007	8–9	10	7	12
PXL161207	10–11	12	7	12
PXL161407	12–13,5	14,5	7	12

Extensão aórtica da endoprótese

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERNO AÓRTICO PRETENDIDO (mm)	DIÂMETRO DA ENDOPRÓTESE (mm)	COMPRIMENTO DA ENDOPRÓTESE (cm)	TAMANHO RECOMENDADO DA BAINHA (Fr)
PXA230300	19–21	23	3,3	18
PXA260300	22–23	26	3,3	18
PXA280300	24–26	28,5	3,3	18
NOVO! PLA320400	27–29	32	4,5	17
NOVO! PLA360400	30–32	36	4,5	18

Bainha GORE® DrySeal



REFERÊNCIA	TAMANHO DA BAINHA (Fr)
SDV1228	12
SDV1428	14
SDV1628	16
SDV1828	18

Todas as bainhas têm 28 cm de comprimento.

Cateter de balão GORE® Tri-Lobe

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERNO DO VASO (mm)
BCM1634	16–34

* TENHA EM ATENÇÃO: Todas as extremidades contralaterais das endopróteses com diâmetros grandes (16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 27 mm) podem ser utilizadas como extensões ilíacas.

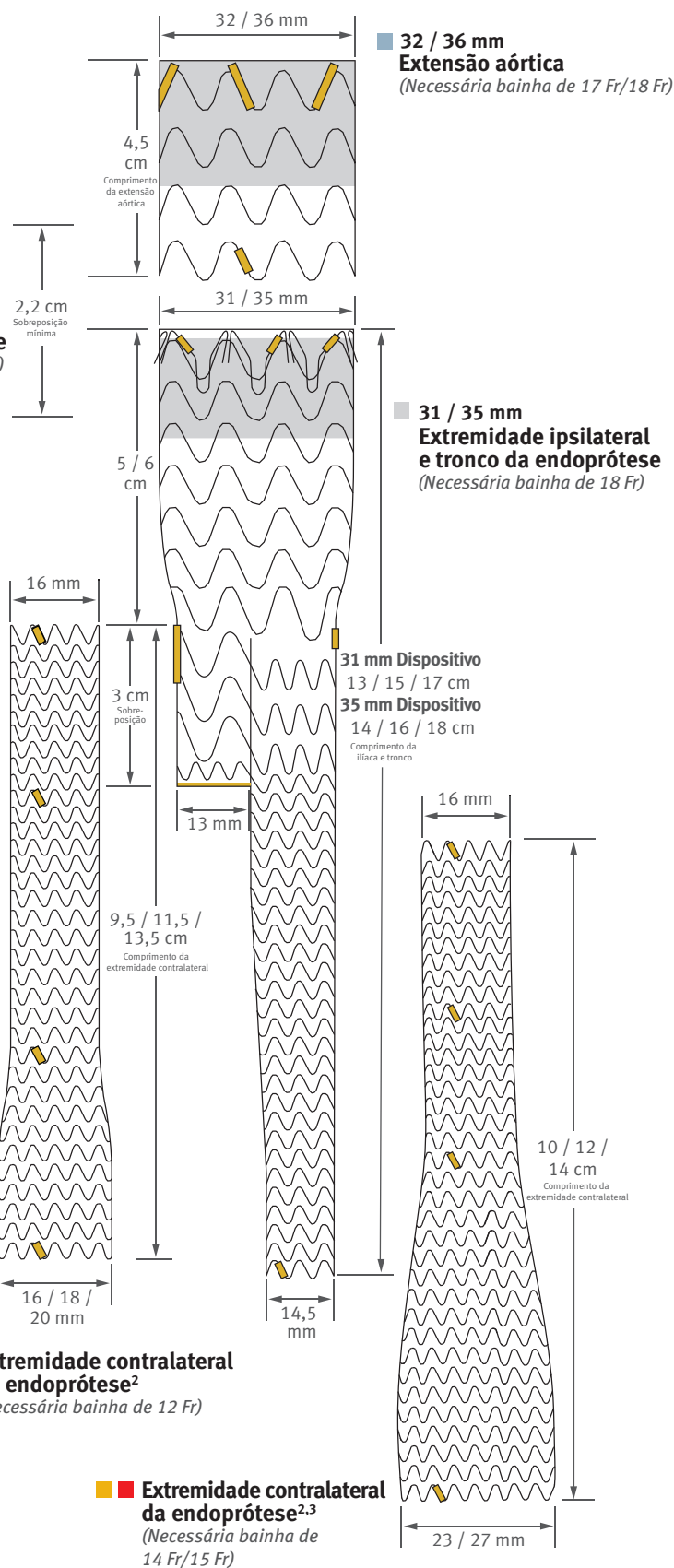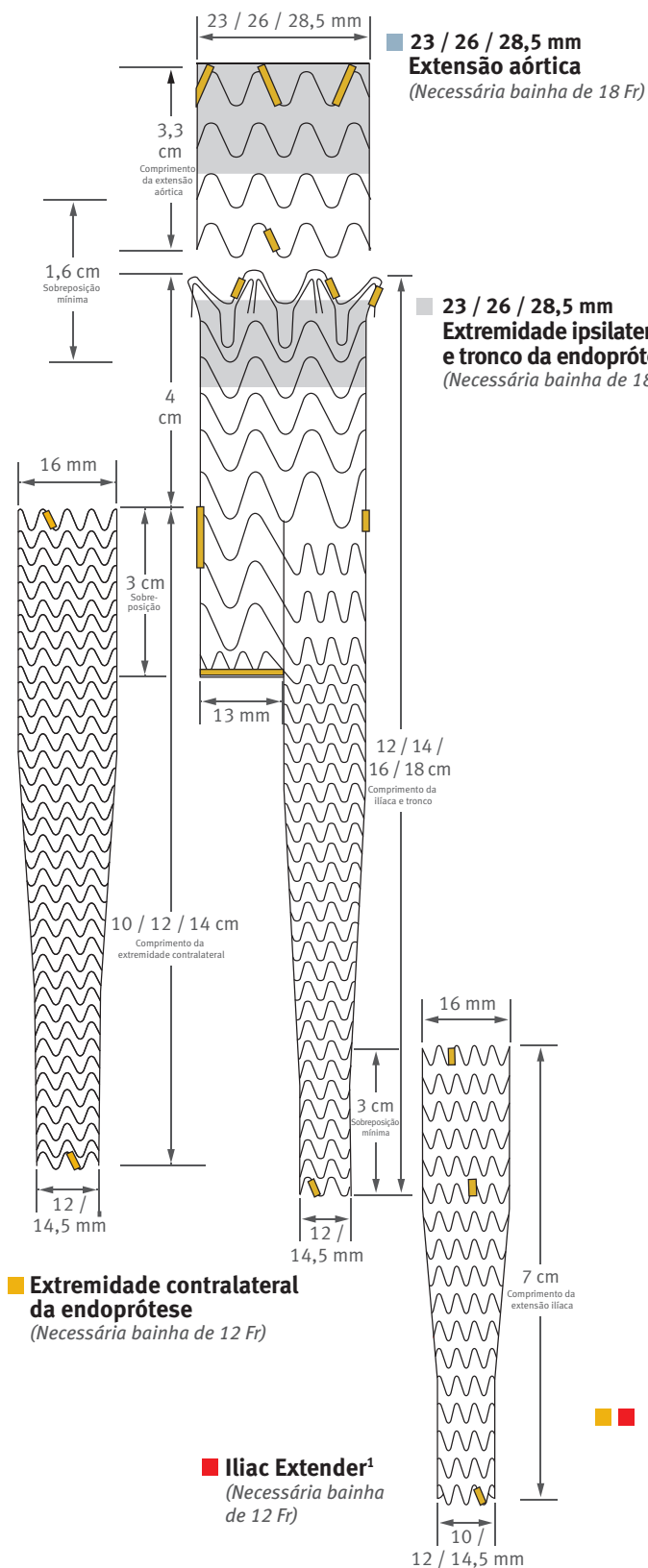

- Trunk-Ipsilateral
- Extremidade contralateral
- Extensão íliaca
- Extensão aórtica

¹ Os tamanhos convencionais da extensão íliaca (10 mm, 12 mm, 14,5 mm) não são compatíveis com as extremidades contralaterais da endopróteses de diâmetro grande (16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 27 mm).

² Todas as extremidades contralaterais das endopróteses com diâmetros grandes (16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 27 mm) podem ser utilizadas como extensões íliacas.

³ A extremidade contralateral da endoprótese de 27 mm x 10 cm não contém um marcador radiopaco 6 cm acima da extremidade distal.

Servir com integridade

Desde há mais de 35 anos que a Gore tem colaborado e prestado apoio a médicos especializados em terapias vasculares. A Gore dá atualmente continuidade a essa tradição com as nossas iniciativas empresariais e associados em campo, os quais trazem valor para os médicos que vão além do design inovador dos nossos produtos.

Servir através do apoio a casos

O pré planeamento de casos e o suporte a procedimentos concentra-se no cuidado ao doente.

Atuando através da educação continuada para médicos

A MEDICAL MASTERY Series da Gore é um compromisso para criar ambientes como os Fellows Workshops (workshops de pares) e os Advanced Symposia (simpósios avançados), nos quais os médicos podem aprender as melhores práticas uns com os outros através do debate, da observação de casos e do trabalho prático com a nossa tecnologia de simulação de ponta.

Servir através da instrução da comunidade

Em colaboração com médicos, a Gore criou um programa líder na indústria para instruir os médicos e doentes da comunidade sobre os factores de risco dos AAA, os sintomas, o rastreio e as terapias para a doença cardiovascular.



W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asia Pacific)

00800.6334.4673 (Europe)

800.437.8181 (United States)

928.779.2771 (United States)

goremedical.com

Os produtos indicados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

GORE®, C3®, EXCLUDER®, MEDICAL MASTERY, PERFORMANCE BY DESIGN, and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. © 2014 W. L. Gore & Associates, Inc. AT0116-PT1 MARCH 2014