



Pasos del procedimiento del ocluser septal GORE® CARDIOFORM

DIÁMETRO DEL OCLUSOR INDICADO EN LA ETIQUETA (mm)	TAMAÑO MÁXIMO RECOMENDADO DEL DEFECTO MEDIDO CON EL DIMENSIONAMIENTO DEL BALÓN DE DETENCIÓN DE FLUJO (mm)
20	11
25	14
30	17

Preparación

- Si está utilizando una guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) o más pequeña, elija una vaina introductora de 12 Fr; si no, elija una vaina introductora de 10 Fr.
- Retire el separador del envase.
- Asegúrese de que el Luer de recuperación esté tenso.
- Lave el catéter antes y después de la carga del ocluser.
- Desplace el mecanismo deslizante separándolo y moviéndolo hacia la derecha para cargar el ocluser.

Despliegue

- Desplace el mecanismo deslizante hacia la izquierda. Este paso puede realizarse mientras se retrae simultáneamente el sistema de implantación para reducir al mínimo el avance del ocluser en el interior de la cámara auricular izquierda.
- El mecanismo deslizante se detiene, el ocluser se ha hecho avanzar por completo hasta más allá del catéter de implantación.
- Haga avanzar el mecanismo deslizante para formar el disco izquierdo plano.
- Tire del disco izquierdo para colocarlo sobre el tabique.
- Siga haciendo avanzar el mecanismo deslizante hasta formar por completo el ocluser.

Fijación

- Mantenga el mango en una posición neutra.
- Libere toda la tensión del tabique interauricular.
- Apriete el seguro del ocluser y desplácelo hacia la derecha.
- El ocluser permanece unido al sistema de implantación por el cordón de recuperación.

Liberación

- Fije el mango.
- Levante, gire y tire del seguro del cordón de recuperación, retirando por completo el cordón.

Recuperación

- Desconecte el Luer de recuperación.
- Desprenda el ojal auricular derecho antes de retirar el ocluser al interior del catéter de implantación.
- Fije el mango y retire el ocluser al interior del catéter de implantación tirando hacia atrás del mango.

