

ゴア® トリローブバルーンカテーテルII

GORE® Tri-Lobe Balloon Catheter



独自の設計によりバルーニング時にも血流を維持

- カテーテル先端に独立した3個のバルーン
- バルーン拡張時にも末梢への血流を確保
- バルーン拡張中のステントグラフトマイグレーションの可能性を低減
- ポリウレタン製コンプライアントバルーン
- 2種類の規格ともに18 Frイントロデューサシースに適合
 - ー Small (バルーン拡張径16~32 mmに対応)
 - ー Large (バルーン拡張径26~42 mmに対応)




ゴア® TAG® ステントグラフト内での拡張時

Together, improving life



3つのバルーンを有する独特なデザインにより、
ステントグラフトタッチアップ時に血流を維持

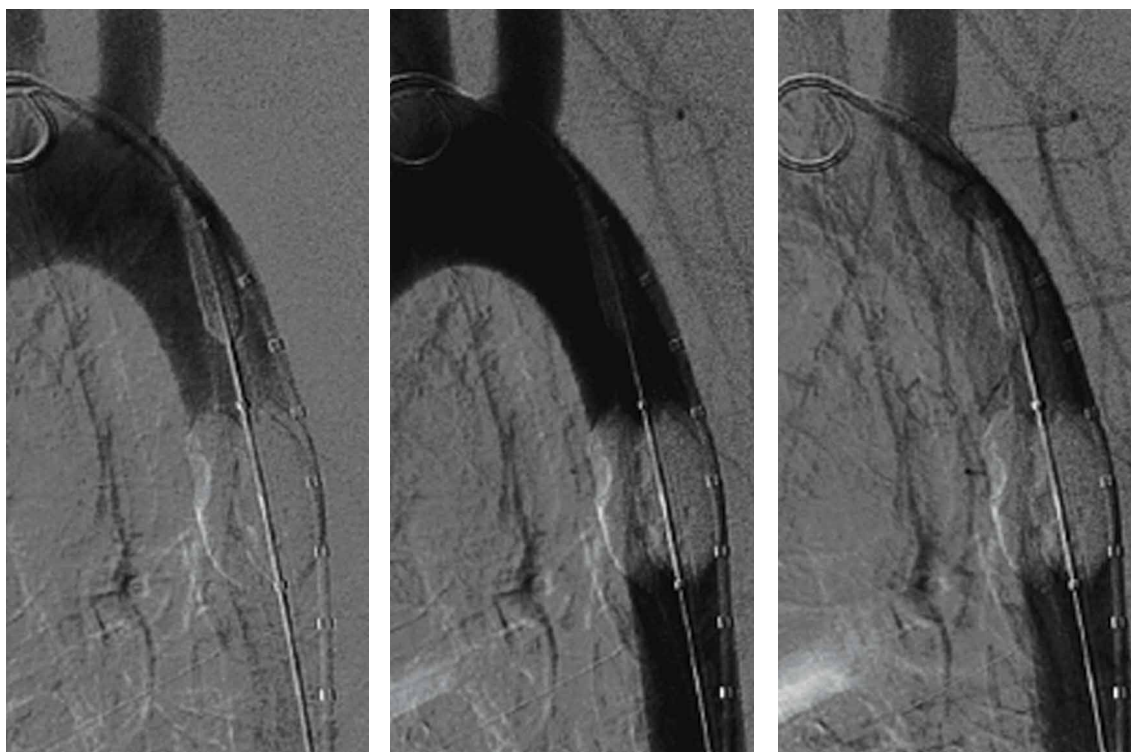

Flow Demo in Porcine Model

ゴア® トリローブバルーンカテーテル II 推奨する拡張溶液の使用量

BCM1634J

バルーン拡張径 (mm)	拡張溶液推奨量 (mL)
16	4
20	6
24	8
28	10
32	13

BCL2645J

バルーン拡張径 (mm)	拡張溶液推奨量 (mL)
26	12
30	14
34	18
38	21
42	25

販売名：ゴア® トリローブバルーンカテーテル II 承認番号：22200BZX00729000
ゴア、GORE、Together, improving life、TAGおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associates の商標です。
©2022 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 22444451-JA MARCH 2022

「添文ナビ」アプリで
電子添付文書を
ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 gore.co.jp

