
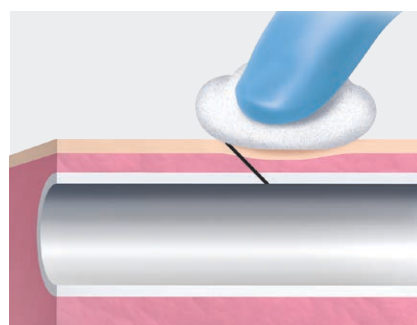


ゴア® アキュシール バスキュラーグラフト 術後2週間以内の穿刺を安全に行うために

3つのポイント

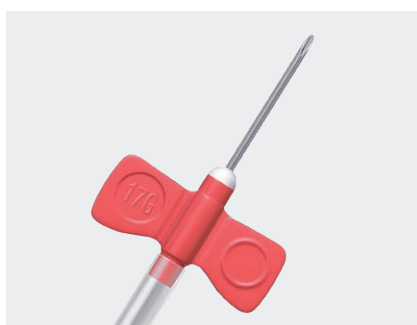

1

穿刺針

穿刺部位の損傷を抑制するため、17ゲージもしくはそれよりも細い穿刺針をご使用ください。

2

回路血流量

静脈の損傷を防止するため、回路血流量を250 mL/min以下に設定してください。

3

用手止血

確実な止血のため、皮膚と人工血管の針孔を適切な力で圧迫し、10 - 15 分間の用手止血を行ってください。

着用を推奨します

- 清潔なガウン
- マスクまたはシールド
- 滅菌手袋

販売名：ゴア® アキュシール バスキュラーグラフト 承認番号：22700BZX00028000 一般的名称：ヘパリン使用非中心循環系人工血管
ゴア、GORE、Together, improving life、ゴア アキュシール、GORE ACUSEAL および記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
© 2023 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 231271404-JA NOVEMBER 2023

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

