


Sizing Guide

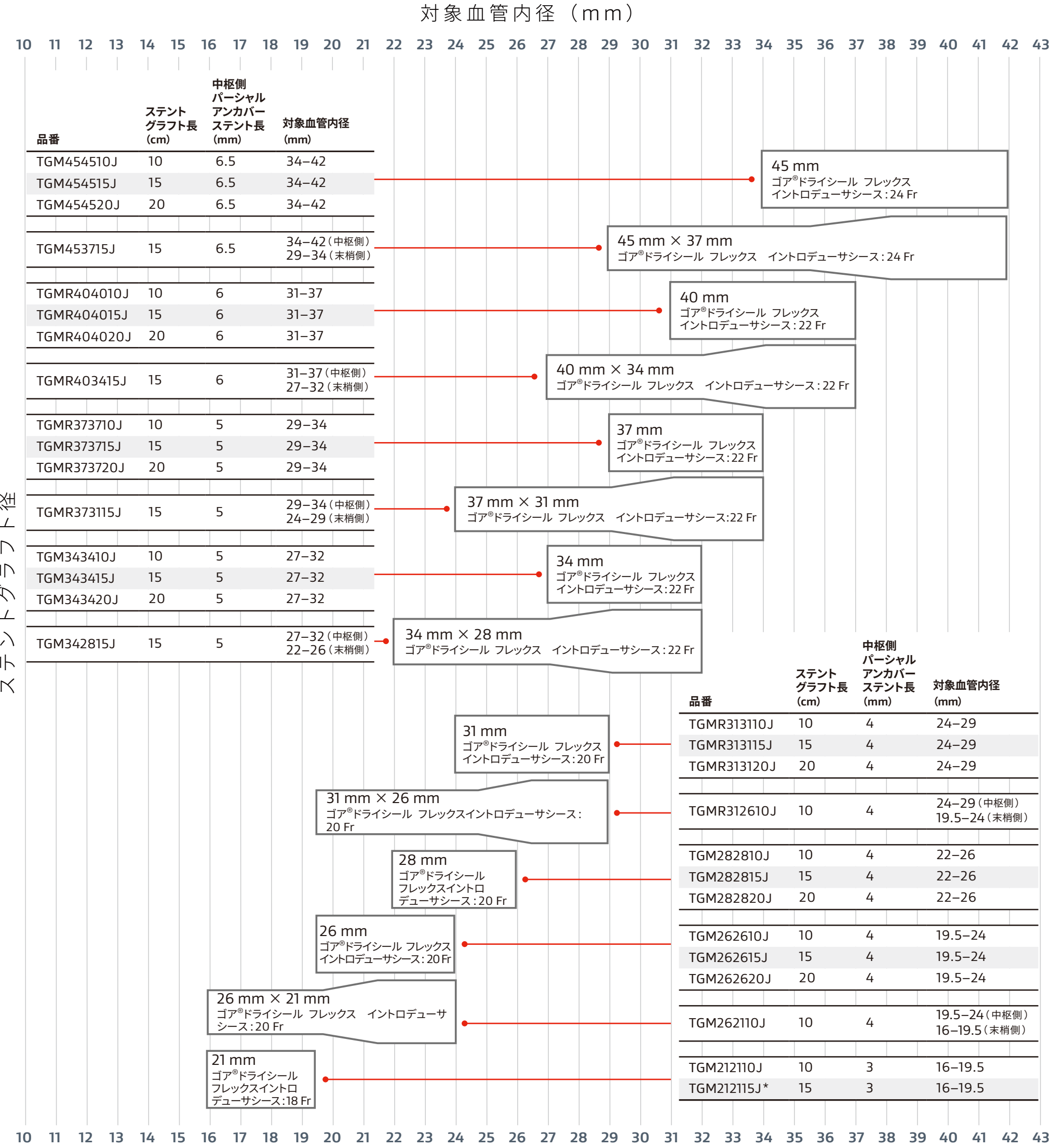

* 特注品番：詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

必要な周辺機器

ゴア®ドライシール フレックス イントロデューサシース†

品番	シースサイズ (Fr)	シース外径 (mm)	シース作業長 (cm)
DSF1833/65	18	6.7	33/65
DSF2033/65	20	7.5	33/65
DSF2233/65	22	8.2	33/65
DSF2433/65	24	8.8	33/65

† 全て公称値

「添文ナビ」アプリで電子添文をご参照ください



販売名：ゴア®CTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム
承認番号：22500BZX00427000
一般的名称：大動脈用ステントグラフト



販売名：ゴア®ドライシール フレックス イントロデューサシース
承認番号：22800BZX00461000
一般的名称：心臓用カテーテルイントロデューサキット



販売名：ゴア®トリローブバルーンカテーテル II
承認番号：22200BZX00729000
一般的名称：中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル

ゴア、GORE、Together, improving life、アクティブコントロール、ACTIVE CONTROL、TAGおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associates の商標です。その他すべての商標に関する権利は、各権利者に帰属します。
© 2025 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 24AR3036-JA01 FEBRUARY 2025

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 日本ゴア合同会社
メディカル・プロダクツ・ディビジョン


〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp




テーパー型デバイス

- ・ストレート型デバイス、テーパー型デバイスともに、パーシャルアンカバーステントは2 cmの中枢側ランディングゾーンに含まれる。

26 × 21、31 × 26 mm径

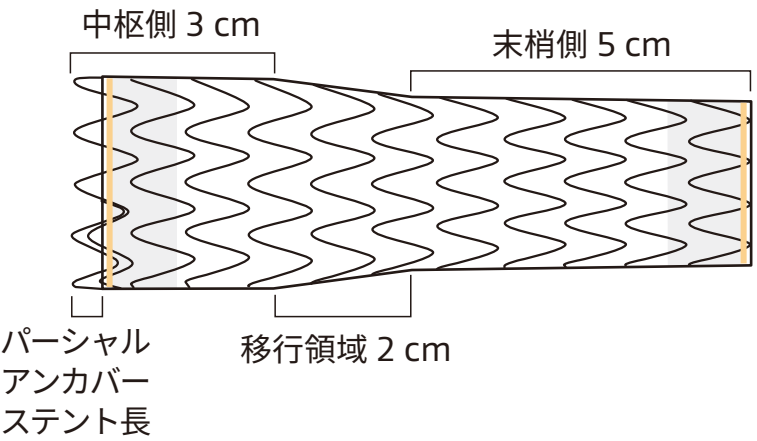


34 × 28、37 × 31、40 × 34、45 × 37 mm径


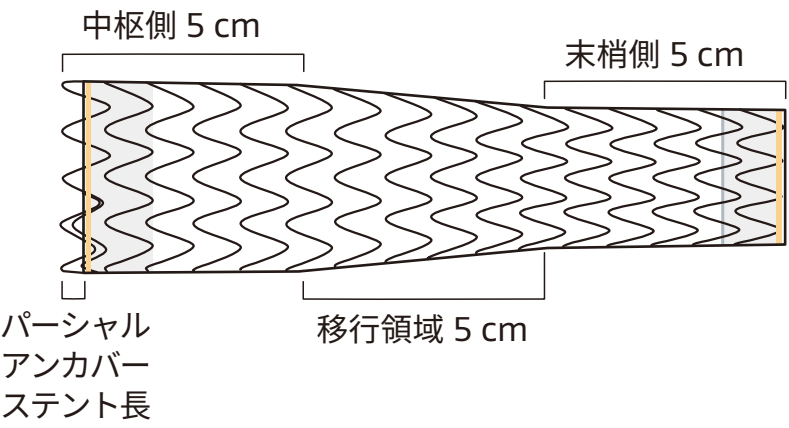


複数のデバイスの使用

- ・ 2つ目のデバイスが1サイズ
もしくは2サイズ大きい場合：重複長≥3 cm
- ・ 2つ目のデバイスが同径の場合：重複長≥5 cm

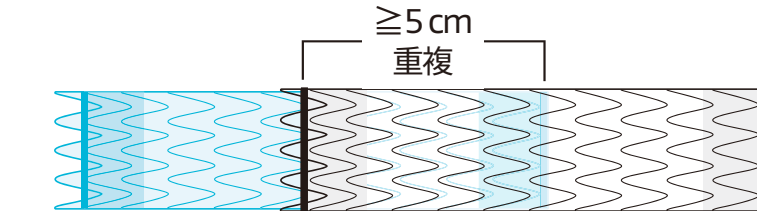

テーパー型デバイスの重複

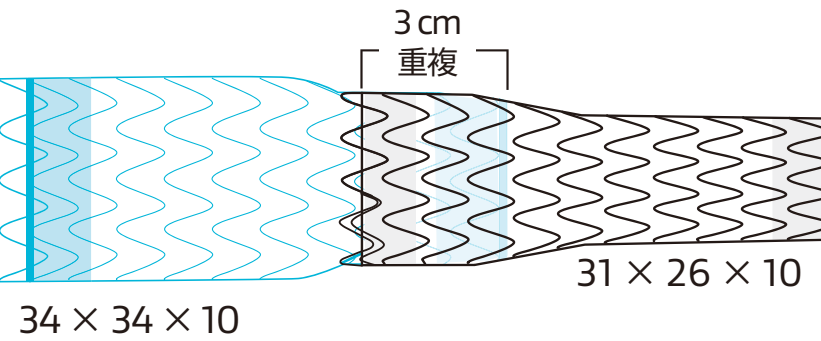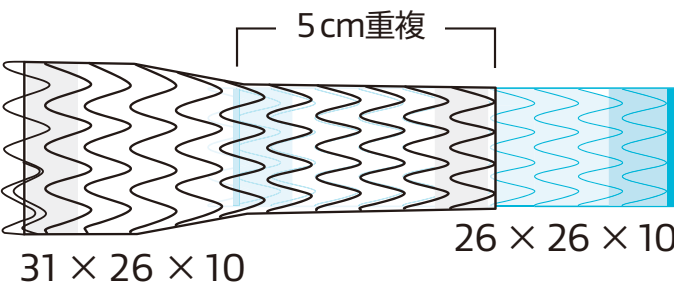

その他 必要な周辺機器

- ・ 250 cm以上の0.035 インチ (0.89 mm)
COOK Lunderquistエクストラスティッフガイドワイヤ[§]
又は同等品
- ・ ヘパリンおよびヘパリン加生食塩水
- ・ 造影剤
- ・ 滅菌済みシリンジ
- ・ 三方活栓
- ・ 血管造影用マーカーカテーテルおよびその他の必要なアクセサリ

§ 販売名：COOK Lunderquist エクストラスティッフガイドワイヤ
承認番号：22400BZX00511000
製造販売元：クックメディカルジャパン合同会社