
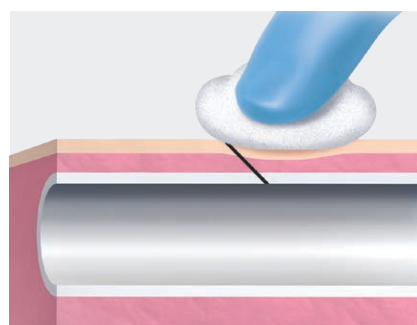


ゴア® アキュシール バスキュラーグラフト 術後2週間以内の穿刺を安全に行うために

3つのポイント

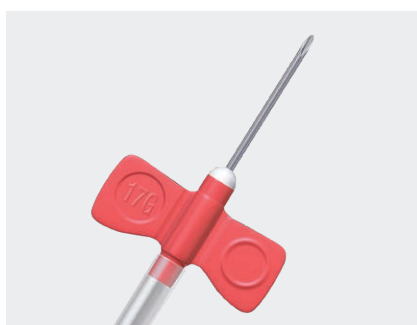

1

穿刺針

穿刺部位の損傷を抑制するため、17ゲージもしくはそれよりも細い穿刺針をご使用ください。

2

回路血流量

静脈の損傷を防止するため、回路血流量を250 mL/min以下に設定してください。

3

用手止血

確実な止血のため、皮膚と人工血管の針孔を適切な力で圧迫し、10 - 15 分間の用手止血を行ってください。

着用を推奨します

- 清潔なガウン
- マスクまたはシールド
- 滅菌手袋