



ステントグラフトの展開手順


- 1 アオルティックコンポーネントとサイドブランチコンポーネントの挿入に必要なシースとガイドワイヤーを配置する。

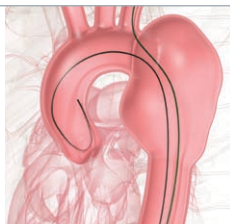


- 2 2本のガイドワイヤーに沿って、アオルティックコンポーネントを適用する治療部位まで進める。

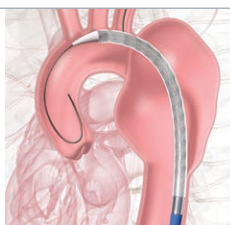


- 3 ガイドワイヤーのねじれを取り除き、アオルティックコンポーネントを回転させてインターナルポータルの位置を左鎖骨下動脈に合わせる。

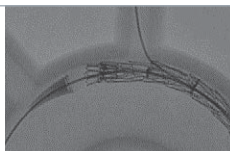


- 4 留置目的位置を通過するまでアオルティックコンポーネントを進め、デバイスが大動脈の外弯側に位置していることを確認して目的位置へ引き戻し、2名による一定の連続した動作でデバイスを展開する。アオルティックコンポーネントのデリバリーカテーテルを抜去する。

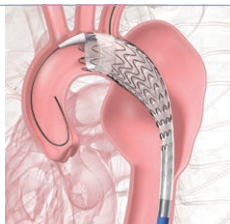

- 5 サイドブランチコンポーネントをアオルティックコンポーネントのインターナルポータルに進め、サイドブランチコンポーネントのインナーゴールドバンドマーカをアオルティックコンポーネントのインターナルポータルの大動脈側マーカに合わせる。

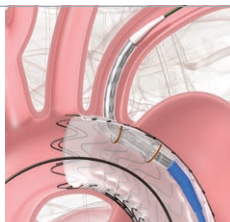



- 6 2名による一定の連続した動作でサイドブランチコンポーネントを展開する。サイドブランチコンポーネントのデリバリーカテーテルを抜去する。
コンプライアントバルーンまたは長さ2 cm以下のノンコンプライアントバルーンを使用し、サイドブランチコンポーネントの全長に対してバルーン拡張を実施する。サイドブランチコンポーネントの屈曲部では手押しによるバルーン拡張を行うこと。手押しでの拡張を行わない場合、サイドブランチコンポーネントおよび血管が直線化され、デバイスのマイグレーションの原因となるおそれがある。

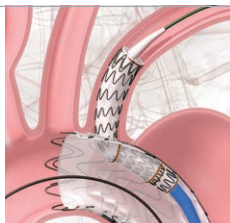


ステントグラフトの延長（オプション）

A. 中枢側への延長

中枢側への延長が必要な場合、大動脈用ガイドワイヤーに沿わせてアオルティックエクステンダーを挿入し、留置目的位置を通過するまで前進させる。先端チップの放射線不透過性のマーカが大動脈壁に隣接して点のように見えるまでデリバリーカテーテルを回転させる。アオルティックエクステンダーが大動脈の外弯側に位置していることを確認して目的位置へ引き戻し、2名によるすばやく連続した動作でデバイスを展開する。アオルティックエクステンダーのデリバリーカテーテルを抜去する。

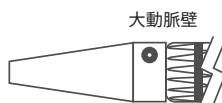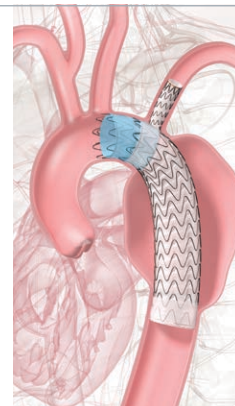

✓ 良好

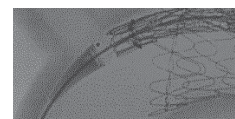

最短の延長可能長

アオルティックコンポーネントのパーシャルアンカバースtent 中枢側とアオルティックエクステンダーの中枢側ゴールドバンドマーカが合わる位置から展開する。


最長の延長可能長

アオルティックコンポーネントの中枢側ゴールドバンドマーカよりアオルティックエクステンダーの全長の半分の長さが延長される位置から展開する。

B. サイドブランチコンポーネントの延長

2本目のサイドブランチコンポーネントを留置する必要がある場合は、20 mmを超えて延長しないことが推奨される。


延長用のサイドブランチコンポーネントのインナーゴールドバンドマーカとアオルティックコンポーネントのインターナルポータルの分枝側ゴールドバンドマーカの位置を合わせることで、1本目のサイドブランチコンポーネントから15-20 mmの延長が可能となる。

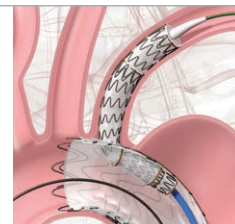

C. 末梢側への延長

末梢への延長にゴア® TAG® コンフォーマブル胸部大動脈ステントグラフトを使用することができ。TAG® コンフォーマブル ステントグラフトはゴア® TAG® 胸部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム (TBE) の留置前または留置後に留置可能である。

TBE 留置後にTAG® コンフォーマブル ステントグラフトで末梢側を延長する場合、延長部の中枢側は、サイドブランチコンポーネントの大動脈側端部から1 cm以上末梢側に位置していること。

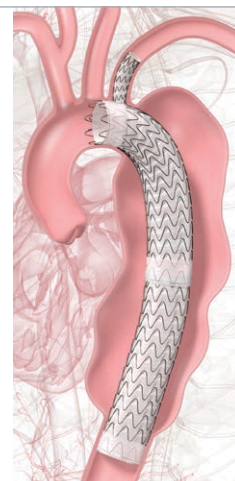

医師はあらかじめトレーニングを受けることが義務付けられており、本デバイスをを用いた治療は医師の責任の下で行われるものとする。

「添文ナビ」アプリで
電子添付文書をご参照ください



販売名: ゴア® TAG® 胸部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム
承認番号: 30600BZX00248000
一般的名称: 大動脈用ステントグラフト



販売名: ゴア® CTAG® 胸部大動脈ステントグラフトシステム
承認番号: 22500BZX00427000
一般的名称: 大動脈用ステントグラフト

ゴア、GORE、Together, improving life、アクティブコントロール、ACTIVE CONTROL、TAG、TBEおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
©2025 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 25AR3014-JA01 APRIL 2025

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

