

É HORA DE REPENSAR O DESVIO PORTO-SISTÊMICO INTRA-HEPÁTICO TRANSJUGULAR (TIPS)



GORE® VIATORR® TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion
combina o legado de patência comprovada¹ com o controle do diâmetro

- **Controle do diâmetro** — Projetado para alcançar um gradiente alvo de pressão portal
- **Controle duradouro do diâmetro*** — Dimensione para fixar o diâmetro desejado
- **Projetado para flexibilidade** — Adaptável a anatomias tortuosas
- **Dispositivo único** — Dimensionamento para diâmetros de 8/9/10 mm durante a implantação

* Baseado em dados de bancada arquivados. Um aumento de diâmetro inferior a 0,25 mm (expansão do diâmetro) demonstrado durante um período simulado de 10 anos em pressões portais fisiológicas.

1. Com base na endoprótese GORE® VIATORR® TIPS: Bureau C, Pagan JCG, Layrargues GP, et al. Patency of stents covered with polytetrafluoroethylene in patients treated by transjugular intrahepatic portosystemic shunts: long term results of a randomized multicentre study. *Liver International* 2007;27(6):742–747.


Especificações do dispositivo

Código do produto	Diâmetro interno da endoprótese (mm)*	Comprimento revestido do enxerto (cm)	Comprimento não revestido (cm)	Diâmetro máximo do fio-guia (polegadas)	Introdutor (Fr)	Diâmetro máximo do balão de dilatação (mm)*
PT8104275K	8-10	4	2	≤0,035	10	10
PT8105275K	8-10	5	2	≤0,035	10	10
PT8106275K	8-10	6	2	≤0,035	10	10
PT8107275K	8-10	7	2	≤0,035	10	10
PT8108275K	8-10	8	2	≤0,035	10	10

* O diâmetro selecionado do balão pode ser 8, 9 ou 10 mm e não deve exceder 10 mm. Um balão que possa atingir uma pressão de insuflação de 10 ATM deve ser selecionado e deve ser insuflado até no mínimo 10 ATM.

Expansão controlada

	Recurso	Vantagem
1	 Prótese revestida com ePTFE	Patência mantida devido a uma menor estenose intra-stent
2	 Estrutura de nitinol	Auto expansível, força radial e flexibilidade
3	 Região portal não revestida	Para perfusão portal e perfusão do desvio
4	 Marcadores de ouro radiopacos	Fácil visualização
5	 Manga com expansão controlada	Dimensione e ajuste o diâmetro durante a implantação

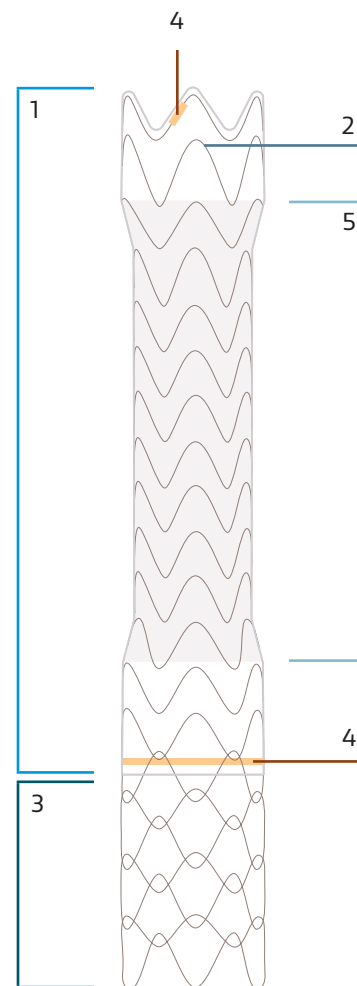

É hora de repensar o TIPS.

Saiba mais em [goremedical.com/rethinkTIPS](https://www.goremedical.com/rethinkTIPS)

Se tiver outras dúvidas, entre em contato com o associado de vendas técnicas da GORE.

 Consult Instructions for Use
eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de Uso* para obter a descrição completa de todas as advertências, precauções e contraindicações. [®] only

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

GORE, *Together, improving life*, VIATORR e designs são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates, Inc.

© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. OUTUBRO 2021

Número do Registro na ANVISA: 80067930044

Nome comercial: GORE® VIATORR® TIPS Endoprosthesis with Controlled Expansion

W. L. Gore & Associates, Inc.

Flagstaff, AZ 86004

Asia Pacific +65 67332882 Europe 00800 6334 4673

United States 800 437 8181 928 779 2771 goremedical.com

