

**Durable outcomes.  
Proven performance.**

---

Endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA

---

Endoprotesi GORE® EXCLUDER®  
Iliac Branch



# Endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA

L'endoprotesi EVAR più studiata\*, concepita per risultati duraturi.

Le prestazioni affidabili della protesi GORE® EXCLUDER® si abbinano al sistema di posizionamento intuitivo GORE® C3® per offrire un ottimale sealing sottorenale e risultati affidabili, anche in anatomie più complesse.

## Proven Performance. Risultati del Global Registry for Endovascular Aortic Treatment (GREAT)

<b>3.273</b>	Pazienti fino a 3 anni di follow-up**
<b>96,0%</b>	Assenza di reinterventi protesi-correlati
<b>93,4%</b>	Assenza di ogni tipo di reintervento
<b>0,0%<sup>†</sup></b>	Migrazione
<b>1,4%</b>	Endoleak di tipo I/III
<b>0,5%</b>	Occlusione di branca



## Sistema di posizionamento GORE® C3®

- Riposizionabile per ottenere un sealing ottimale
- Capacità unica di ricompressione dell'estremità prossimale e riposizionamento per un rilascio ideale
- Più opportunità di massimizzare il sealing sottorenale

# Endoprotesi GORE® EXCLUDER® Iliac Branch

Lo studio clinico US IDE dispone ora dei dati di follow-up a 2 anni per tutti i pazienti dell'arruolamento primario (n = 63).

## Dati a 2 anni

**100%** Pervietà – arteria iliaca esterna

**95,1%** Pervietà – arteria iliaca interna

**93,7%** Assenza di reinterventi

**0%** Claudicatio glutea

**0%** Disfunzione erettile di nuovo esordio

**98,3%** Assenza di allargamento del CIAA (> 5 mm)

**152 minuti**

Tempo procedurale



**114 ml**

Contrasto utilizzato



**40 minuti**

Tempo di fluoroscopia



**95,2%**

Successo tecnico<sup>†</sup>



Questo sistema "All-in-One" è stato progettato specificamente per l'uso nelle arterie iliache. È l'unica soluzione per branch iliaco "off-the-shelf" approvata dall'FDA.

**Il salvataggio dell'ipogastrica è importante:**  
Trattamento raccomandato<sup>1,2</sup> per mantenere la qualità di vita

**Soddisfa le attese:**

Alta pervietà<sup>3</sup>, conformabilità e durabilità

- Gate per l'iliaca interna pre-incannulato e rilascio bifemorale per la semplicità d'utilizzo
- Basso profilo (16 Fr) del sistema di posizionamento per facilitare l'accesso vascolare e la navigazione
- Rilascio a due fasi e riposizionabile per il posizionamento accurato della componente per iliaca



# Design affidabile. Legacy affidabile.

L'evoluzione della famiglia di protesi GORE® EXCLUDER® è basata su quanto abbiamo appreso negli oltre 20 anni di esperienza nell'EVAR.

## Esperienza raccolta in tutto il mondo

- Oltre 300.000 pazienti trattati con Endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA<sup>§</sup>
- Oltre 10.000 pazienti trattati con Endoprotesi GORE® EXCLUDER® Iliac Branch<sup>||</sup>

## Durabilità

- 1** **Struttura priva di suture**
  - Tecnologia protesica in PTFE espanso sulle superfici lumenali e abluminali
- 2** **Design sinusoidale d'avanguardia dello stent**
  - Maggiore flessibilità e conformabilità a lungo termine
- 3** **Strati sovrapposti in ePTFE brevettati**
  - Bassa permeabilità con proprietà di resistenza all'abrasione
  - Conformabilità in anatomie tortuose
- 4** **Cuffia di sealing**
  - Progettata per prevenire il rischio di endoleak
- 5** **Ancoraggio infrarenale attivo**
  - Gli uncini per l'ancoraggio attivo sono stati progettati per prevenire la migrazione

Endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA



Endoprotesi GORE® EXCLUDER® Iliac Branch



# Collaborazione con i medici e costante impegno.

Quando ci uniamo ai nostri partner nella comunità medica, collaboriamo al miglioramento della cura dei pazienti. Grazie all'unica soluzione per branch iliaco approvata dall'FDA e ai risultati duraturi con oltre 20 anni di esperienza nell'EVAR, la famiglia di protesi GORE® EXCLUDER® propone soluzioni affidabili per i medici e sulle quali i pazienti possono contare.

Per saperne di più, visitare il sito [goremedical.com/aortic](http://goremedical.com/aortic)

L'endoprotesi GORE® EXCLUDER® Iliac Branch deve essere utilizzata con l'endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA e non è indicata per essere usata da sola.

\* Dati provenienti da studi clinici e registri sponsorizzati dall'azienda presenti su [clinicaltrials.gov](http://clinicaltrials.gov) per le endoprotesi attualmente disponibili.

\*\* GREAT. n=3.273. Per calcolare i tassi complessivi degli eventi a partire dall'intervento fino alla fine del periodo dello studio, sono stati inclusi tutti i soggetti che potrebbero aver manifestato eventi, a prescindere dalla durata del follow-up. Relativamente ai risultati clinici, il registro GREAT raccoglie solo i dati riportati dai centri partecipanti come eventi avversi seri.

† È stata segnalata una migrazione periprocedurale. Non sono state segnalate migrazioni durante i 3 anni di follow-up.

‡ Definito come impianto riuscito con assenza di endoleak.

§ Dati basati sul numero di tronchi principali distribuiti.

|| Dati basati sul numero delle componenti con branch iliaco distribuite.

1. Chaikof EL, Dalman RL, Eskandari MK, et al. The Society for Vascular Surgery practice guidelines on the care of patients with an abdominal aortic aneurysm. *Journal of Vascular Surgery* 2018;67(1):2-77.e2.
2. Moll F.L., Powell J.T., Fraedrich G., et al; European Society for Vascular Surgery. Management of abdominal aortic aneurysms clinical practice guidelines of the European Society for Vascular Surgery. *European Journal of Vascular & Endovascular Surgery* 2011;41(Supplement 1):S1-S58.
3. Schneider D. B. One-year U.S. results of GORE® EXCLUDER® Iliac Branched Endograft: Advantages and limitations. Presented at the 42nd Annual Symposium on Vascular and Endovascular Issues, Techniques, *Horizons* (VEITHsymposium); November 17-21, 2015; New York, NY.

I prodotti elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

GORE®, C3®, EXCLUDER® e design sono marchi commerciali di W. L. Gore & Associates.  
© 2018 W. L. Gore & Associates GmbH AX0271-IT1 MAGGIO 2018



**W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.**  
Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asia)  
00800.6334.4673 (Europa)  
800.437.8181 (Stati Uniti)  
928.779.2771 (Stati Uniti)

[goremedical.com](http://goremedical.com)