


Sizing Guide

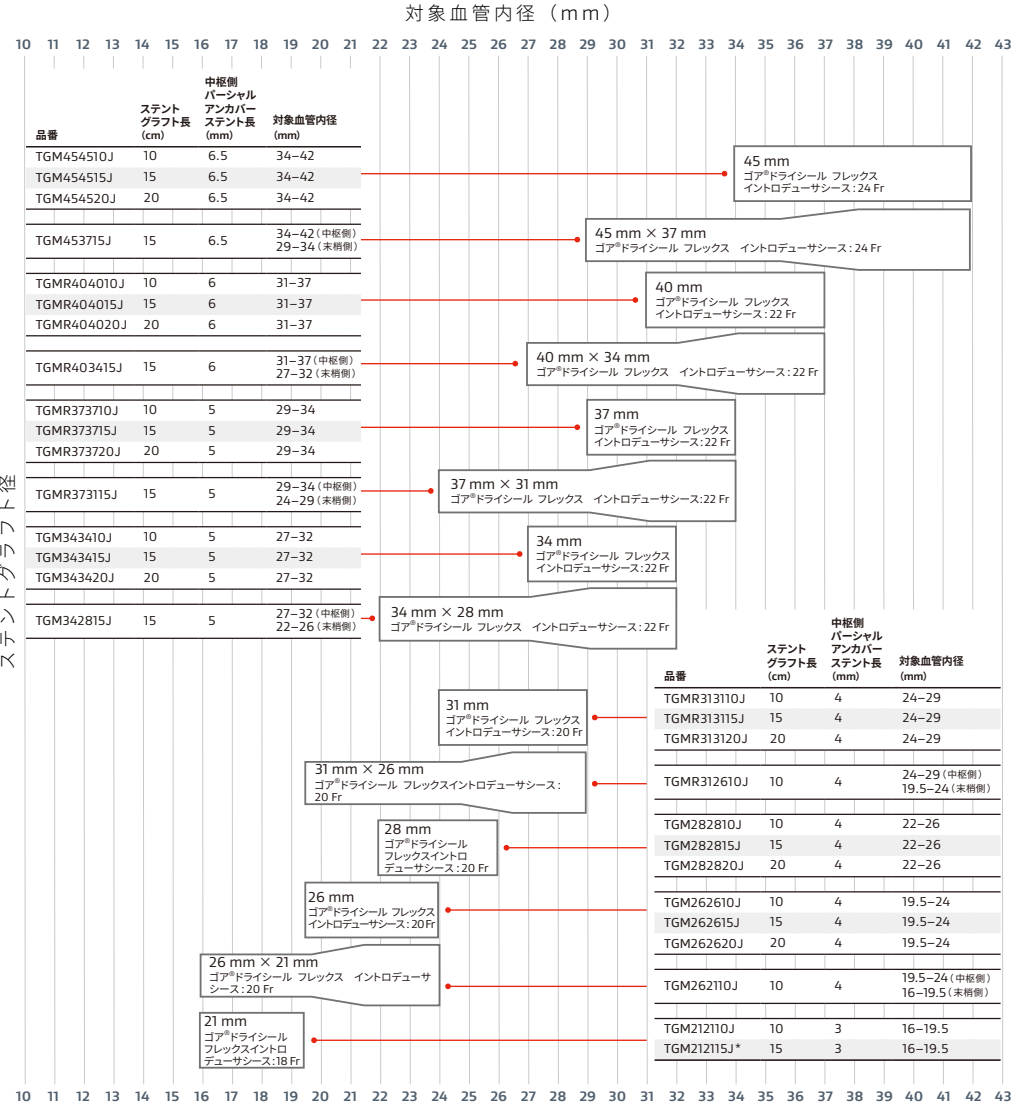

* 特注品番: 詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

必要な周辺機器

ゴア®ドライシール フレックス イントロデュースサシス†

品番	シースサイズ (Fr)	シース外径 (mm)	シース作業長 (cm)
DSF1833/65	18	6.7	33/65
DSF2033/65	20	7.5	33/65
DSF2233/65	22	8.2	33/65
DSF2433/65	24	8.8	33/65

† 全て公称値

「添文ナビ」アプリで電子添文をご参照ください

販売名: ゴア®CTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム
承認番号: 225008ZX00427000
一般的名称: 大動脈用ステントグラフト

販売名: ゴア®ドライシール フレックス イントロデュースサシス
承認番号: 228008ZX00461000
一般的名称: 心臓用カテーテルイントロデュースサシス

販売名: ゴア®トリローバルーンカテーテル II
承認番号: 222008ZX00729000
一般的名称: 中心循環系血管腔内用チューブ及びカテーテル

ゴア, GORE, Together, improving life®, アクティブコントロール, ACTIVE CONTROL, TAGおよび記載のデザイン(ロゴ)は, W. L. Gore & Associates の商標です。その他すべての商標に関する権利は, 各権利者に帰属します。
© 2025 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 25AR3015-JA01 MARCH 2025

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 日本ゴア合同会社
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

ゴア®トリローバルーンカテーテル II

品番	シースサイズ (Fr)	バルーン拡張径 (mm)
BCM1634J	18	16-32
BCL2645J	18	26-42


推奨する拡張溶液の使用量

バルーン拡張径 (mm)	拡張溶液推奨量 (mL)	バルーン拡張径 (mm)	拡張溶液推奨量 (mL)
16	4	26	12
20	6	30	14
24	8	34	18
28	10	38	21
32	13	42	25


テーパ型デバイス

- ・ストレート型デバイス、テーパ型デバイスともに、パーシャルアンカースtentは2 cmの中極側ランディングゾーンに含まれる。

26 × 21, 31 × 26 mm径

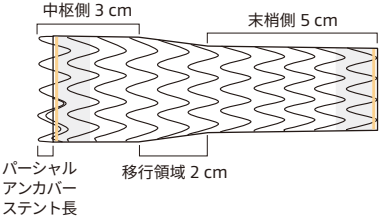


34 × 28, 37 × 31, 40 × 34, 45 × 37 mm径


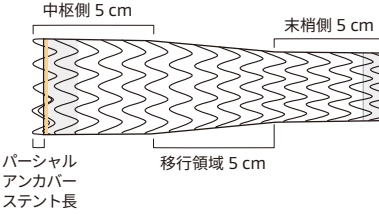


複数のデバイスの使用

- ・2つ目のデバイスが1サイズもしくは2サイズ大きい場合: 重複長 ≥ 3 cm
- ・2つ目のデバイスが同径の場合: 重複長 ≥ 5 cm

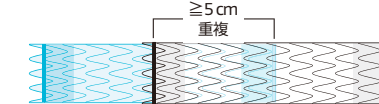

テーパ型デバイスの重複

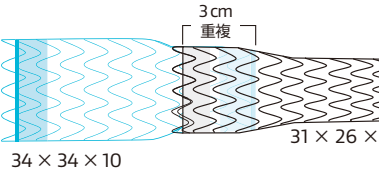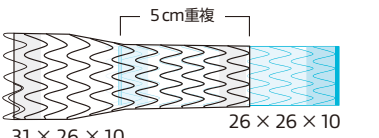

その他必要な周辺機器

- ・250 cm以上の0.035 インチ (0.89 mm) COOK Lunderquistエクストラステディッドガイドワイヤ®又は同等品
- ・ヘパリンおよびヘパリン加生理食塩水
- ・造影剤
- ・滅菌済みシリンジ
- ・三方活栓
- ・血管造影用マーカーカテーテルおよびその他の必要なアクセサリ

§ 販売名: COOK Lunderquist エクストラステディッドガイドワイヤ
承認番号: 224008ZX00511000
製造販売元: クックメディカルジャパン合同会社

