



GUIA DE TAMANHOS DO DISPOSITIVO

Dimensões e requisitos para escolher o tamanho do dispositivo

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis com portal de 8 mm

Componente aórtico e sistema de liberação do componente aórtico

Número de catálogo	Diâmetro do dispositivo (mm)	Diâmetros aórticos previstos (mm)	Diâmetro interno do portal (mm)	Comprimento do segmento proximal (mm)	Comprimento proximal coberto (mm)	Comprimento do stent parcialmente descoberto (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Tamanho da bainha introdutora GORE® DRYSEAL Flex (Fr)
TAC082110K	21	16–19,5	8	20	17	3	10	20
TAC082610K	26	19,5–24	8	20	16	4	10	20
TAC082615K	26	19,5–24	8	20	16	4	15	20
TAC082810K	28	22–26	8	20	16	4	10	22
TAC082815K	28	22–26	8	20	16	4	15	22
TAC082820K	28	22–26	8	20	16	4	20	22
TAC083115K	31	24–29	8	20	16	4	15	22
TAC083120K	31	24–29	8	20	16	4	20	22
TAC083415K	34	27–32	8	20	15	5	15	24
TAC083420K	34	27–32	8	20	15	5	20	24
TAC083715K	37	29–34	8	25	20	5	15	24
TAC083720K	37	29–34	8	25	20	5	20	24
TAC084015K	40	31–37	8	25	19	6	15	26
TAC084020K	40	31–37	8	25	19	6	20	26
TAC084515K	45	34–42	8	25	18,5	6,5	15	26
TAC084520K	45	34–42	8	25	18,5	6,5	20	26

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis com portal de 12 mm

Componente aórtico e sistema de liberação do componente aórtico

Número de catálogo	Diâmetro do dispositivo (mm)	Diâmetros aórticos previstos (mm)	Diâmetro interno do portal (mm)	Comprimento do segmento proximal (mm)	Comprimento proximal coberto (mm)	Comprimento do stent parcialmente descoberto (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Tamanho da bainha introdutora GORE® DRYSEAL Flex (Fr)
TAC123115K	31	24–29	12	40	36	4	15	22
TAC123120K	31	24–29	12	40	36	4	20	22
TAC123415K	34	27–32	12	40	35	5	15	24
TAC123420K	34	27–32	12	40	35	5	20	24
TAC123715K	37	29–34	12	40	35	5	15	24
TAC123720K	37	29–34	12	40	35	5	20	24
TAC124015K	40	31–37	12	40	34	6	15	26
TAC124020K	40	31–37	12	40	34	6	20	26
TAC124515K	45	34–42	12	40	33,5	6,5	15	26
TAC124520K	45	34–42	12	40	33,5	6,5	20	26

Dimensões e requisitos para selecionar o tamanho do dispositivo

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis

Componente do ramo lateral

Número de catálogo	Diâmetro do dispositivo (mm)	Diâmetro previsto do vaso ramificado (mm)	Diâmetro do segmento do portal (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Comprimento requerido do vaso ramificado (cm)
TSB080806K	8	6–7,5	8	6	3
TSB081006K	10	7,5–9	8	6	3
TSB081206K	12	9–11	8	6	3
TSB081506K	15	11–13	8	6	3
TSB081706K	17	13–15	8	6	3
TSB121506K	15	11–13	12	6	2,5
TSB121706K	17	13–15	12	6	2,5
TSB122006K	20	15–18	12	6	2,5

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis

Extensor aórtico e sistema de liberação do extensor aórtico

Número de catálogo	Diâmetro do dispositivo (mm)	Diâmetros aórticos previstos (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Comprimento do stent parcialmente descoberto (mm)	Tamanho da bainha introdutora GORE® DRYSEAL Flex (Fr)
TE2136K	21	16–19,5	3,6	3	20
TE2638K	26	19,5–24	3,8	4	20
TE2840K	28	22–26	4	4	22
TE3140K	31	24–29	4	4	22
TE3442K	34	27–32	4,2	5	24
TE3742K	37	29–34	4,2	5	24
TE4043K	40	31–37	4,3	6	26
TE4546K	45	34–42	4,6	6,5	26



Consulte as Instruções de Uso
eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de Uso* no Web site eifu.goremedical.com para uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precauções e contraindicações aplicáveis para os mercados onde este produto está disponível. R_X Only

Registro ANVISA GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis – 80067930048

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas mencionadas são marcas comerciais de uma empresa do grupo de afiliadas da Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs “Together, improving life” são marcas registradas de uma empresa da Gore. 26AR1029-PT01 MAIO DE 2026 MAT-0572-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia-Pacífico +65 67332882 Austrália/Nova Zelândia 1800 680 424 Europa 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

