



Together, improving life

GORE® TAG®

Thoracic Branch Endoprosthesis



GUIA DE CONSULTA DE TAMANHOS DO DISPOSITIVO

BRAZIL



GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis

Componente aórtico e sistema de liberação do componente aórtico

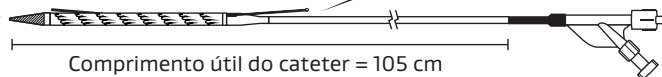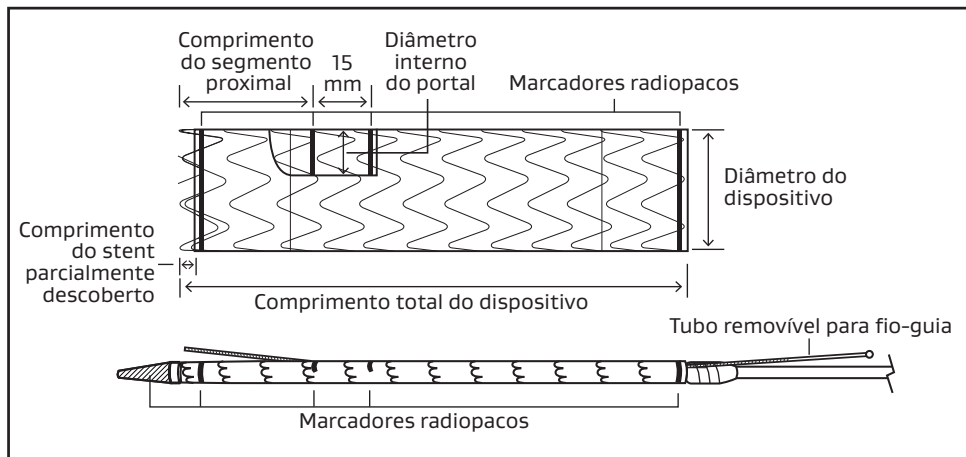

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis com portal de 8 mm



Componente aórtico e sistema de liberação do componente aórtico

Tamanhos e requisitos de dimensionamento do dispositivo

Número de catálogo	Diâmetro do dispositivo (mm)	Diâmetros aórticos previstos (mm)	Diâmetro interno do portal (mm)	Comprimento do segmento proximal (mm)	Comprimento proximal coberto (mm)	Comprimento do stent parcialmente descoberto (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Tamanho da GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath (Fr)
TAC082110K	21	16–19,5	8	20	17	3	10	20
TAC082610K	26	19,5–24	8	20	16	4	10	20
TAC082615K	26	19,5–24	8	20	16	4	15	20
TAC082810K	28	22–26	8	20	16	4	10	22
TAC082815K	28	22–26	8	20	16	4	15	22
TAC082820K	28	22–26	8	20	16	4	20	22
TAC083115K	31	24–29	8	20	16	4	15	22
TAC083120K	31	24–29	8	20	16	4	20	22
TAC083415K	34	27–32	8	20	15	5	15	24
TAC083420K	34	27–32	8	20	15	5	20	24
TAC083715K	37	29–34	8	25	20	5	15	24
TAC083720K	37	29–34	8	25	20	5	20	24
TAC084015K	40	31–37	8	25	19	6	15	26
TAC084020K	40	31–37	8	25	19	6	20	26
TAC084515K	45	34–42	8	25	18,5	6,5	15	26
TAC084520K	45	34–42	8	25	18,5	6,5	20	26

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis

Componente aórtico e sistema de liberação do componente aórtico

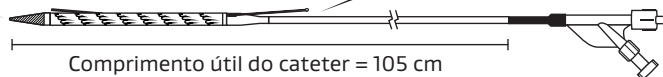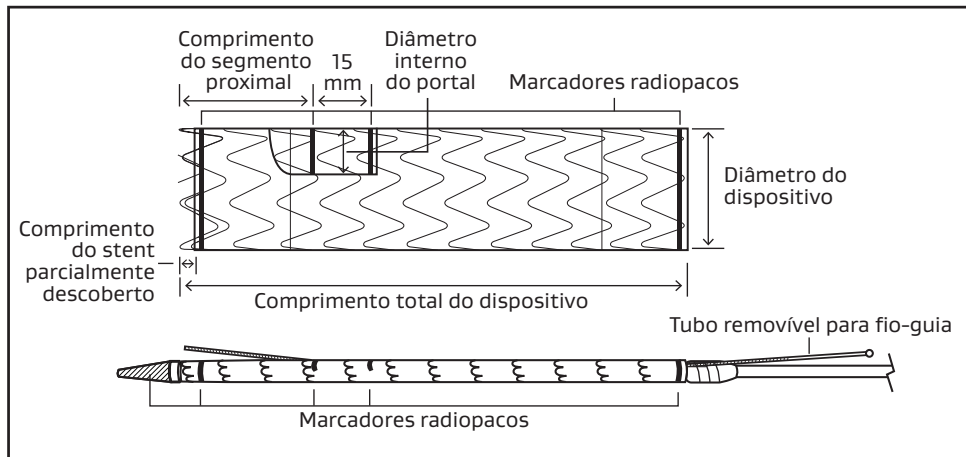

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis com portal de 12 mm


Componente aórtico e sistema de liberação do componente aórtico

Tamanhos e requisitos de dimensionamento do dispositivo

Número de catálogo	Diâmetro do dispositivo (mm)	Diâmetros aórticos previstos (mm)	Diâmetro interno do portal (mm)	Comprimento do segmento proximal (mm)	Comprimento proximal coberto (mm)	Comprimento do stent parcialmente descoberto (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Tamanho da GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath (Fr)
TAC123115K	31	24–29	12	40	36	4	15	22
TAC123120K	31	24–29	12	40	36	4	20	22
TAC123415K	34	27–32	12	40	35	5	15	24
TAC123420K	34	27–32	12	40	35	5	20	24
TAC123715K	37	29–34	12	40	35	5	15	24
TAC123720K	37	29–34	12	40	35	5	20	24
TAC124015K	40	31–37	12	40	34	6	15	26
TAC124020K	40	31–37	12	40	34	6	20	26
TAC124515K	45	34–42	12	40	33,5	6,5	15	26
TAC124520K	45	34–42	12	40	33,5	6,5	20	26

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis

Componente do ramo lateral e sistema de liberação do componente do ramo lateral

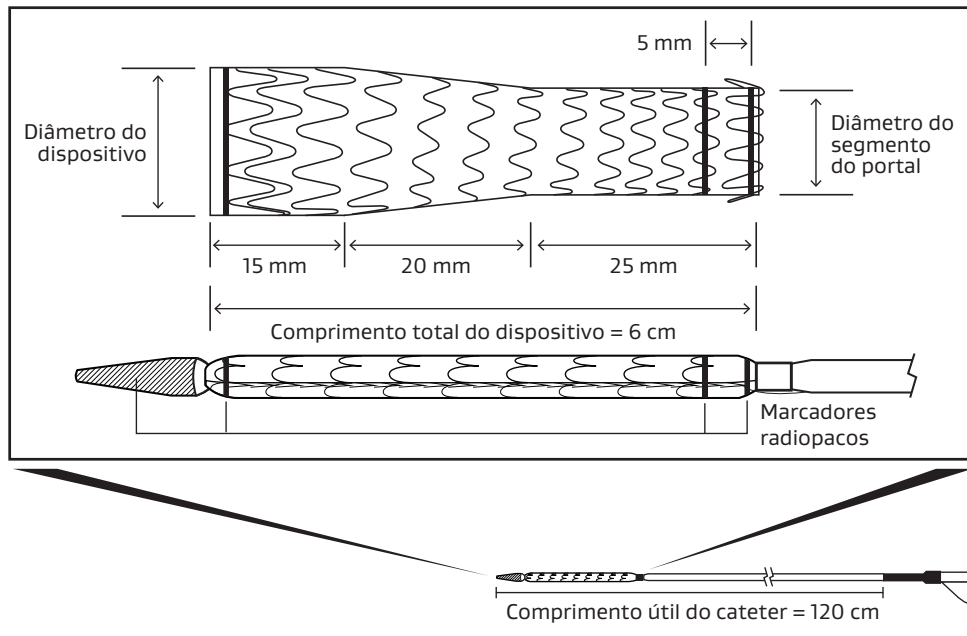

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis


Componente do ramo lateral e sistema de liberação do componente do ramo lateral

Tamanhos e requisitos de dimensionamento do dispositivo

Número de catálogo	Diâmetro do dispositivo (mm)	Diâmetro previsto do vaso ramificado (mm)	Diâmetro do segmento do portal (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Comprimento requerido do vaso ramificado (cm)	Tamanho do GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath (Fr)
TSB080806K	8	6–7,5	8	6	3	14
TSB081006K	10	7,5–9	8	6	3	14
TSB081206K	12	9–11	8	6	3	14
TSB081506K	15	11–13	8	6	3	14
TSB081706K	17	13–15	8	6	3	14
TSB121506K	15	11–13	12	6	2,5	14
TSB121706K	17	13–15	12	6	2,5	14
TSB122006K	20	15–18	12	6	2,5	14

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis

Extensor aórtico e sistema de liberação do extensor aórtico

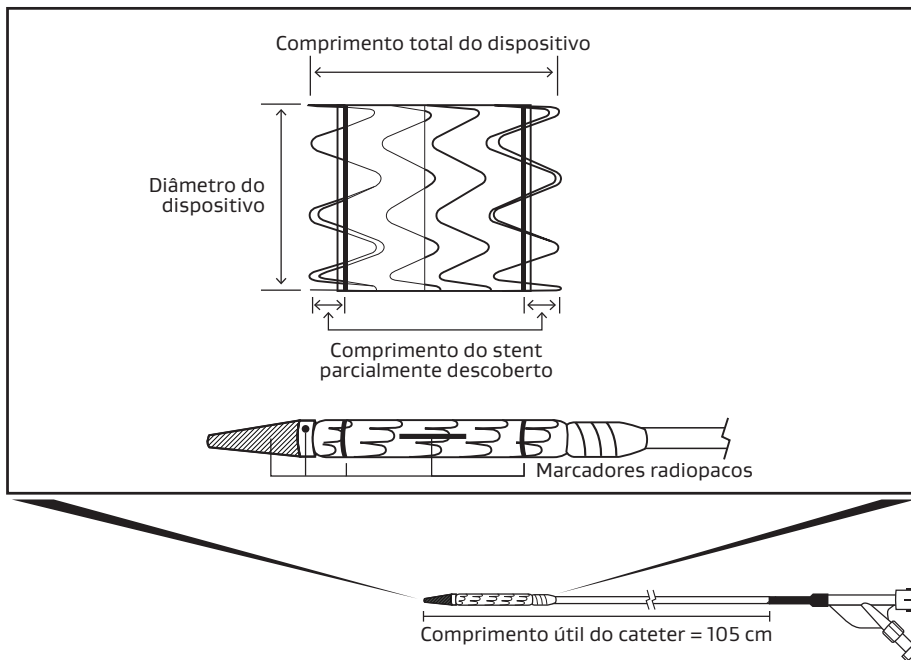

GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis

Extensor aórtico e sistema de liberação do extensor aórtico

Tamanhos e requisitos de dimensionamento do dispositivo

Número de catálogo	Diâmetro do dispositivo (mm)	Diâmetros aórticos previstos (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Comprimento do stent parcialmente descoberto (mm)	Tamanho do GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath (Fr)
TE2136K	21	16–19,5	3,6	3	20
TE2638K	26	19,5–24	3,8	4	20
TE2840K	28	22–26	4	4	22
TE3140K	31	24–29	4	4	22
TE3442K	34	27–32	4,2	5	24
TE3742K	37	29–34	4,2	5	24
TE4043K	40	31–37	4,3	6	26
TE4546K	45	34–42	4,6	6,5	26

GORE® TAG® Conformable Thoracic Stent Graft with ACTIVE CONTROL System

Dispositivos retos

Número de catálogo	Diâmetro aórtico previsto (mm)	Diâmetro proximal (mm)	Diâmetro distal (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho recomendado da GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath (Fr)	Comprimento do stent parcialmente descoberto (mm)
TGM212110K	16–19,5	21	21	10	18	3
TGM262610K	19,5–24	26	26	10	20	4
TGM282810K	22–26	28	28	10	20	4
TGM282815K	22–26	28	28	15	20	4
TGMR313110K	24–29	31	31	10	20	4
TGMR313115K	24–29	31	31	15	20	4
TGMR313120K	24–29	31	31	20	20	4
TGM343410K	27–32	34	34	10	22	5
TGM343415K	27–32	34	34	15	22	5
TGM343420K	27–32	34	34	20	22	5
TGMR373710K	29–34	37	37	10	22	5
TGMR373715K	29–34	37	37	15	22	5
TGMR373720K	29–34	37	37	20	22	5
TGMR404010K	31–37	40	40	10	22	6
TGMR404015K	31–37	40	40	15	22	6
TGMR404020K	31–37	40	40	20	22	6
TGM454510K	34–42	45	45	10	24	6,5
TGM454515K	34–42	45	45	15	24	6,5
TGM454520K	34–42	45	45	20	24	6,5

GORE® TAG® Conformable Thoracic Stent Graft with ACTIVE CONTROL System

Dispositivos com *taper* (cônicos)


Número de catálogo	Diâmetro aórtico previsto (mm)	Diâmetro proximal (mm)	Diâmetro distal (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho recomendado da GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath (Fr)	Comprimento do stent parcialmente descoberto (mm)
TGM262110K	19,5–24/ 16–19,5	26	21	10	20	4
TGMR312610K	24–29/ 19,5–24	31	26	10	20	4

GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath

GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath

Número de catálogo	Tamano da bainha (Fr)	Diâmetro interno mínimo da bainha ID (mm)	Diâmetro externo nominal da bainha (mm)	Comprimento útil (cm)
DSFI033K	10	3,3	4,0	33
DSFI045K	10	3,3	4,0	45
DSFI065K	10	3,3	4,0	65
DSFI233K	12	4,0	4,7	33
DSFI245K	12	4,0	4,7	45
DSFI265K	12	4,0	4,7	65
DSFI433K	14	4,7	5,3	33
DSFI465K	14	4,7	5,3	65
DSFI533K	15	5,0	5,6	33
DSFI633K	16	5,3	6,1	33
DSFI665K	16	5,3	6,1	65
DSFI833K	18	6,0	6,7	33
DSFI865K	18	6,0	6,7	65
DSF2033K	20	6,7	7,5	33
DSF2065K	20	6,7	7,5	65
DSF2233K	22	7,3	8,2	33
DSF2265K	22	7,3	8,2	65
DSF2433K	24	8,0	8,8	33
DSF2465K	24	8,0	8,8	65

GORE® Tri-Lobe Balloon Catheter

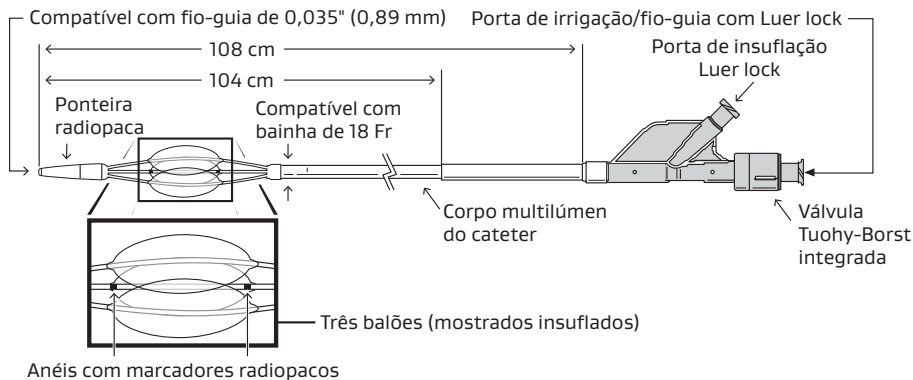

Tamanhos e requisitos de dimensionamento do dispositivo

Número de catálogo	Diâmetro interno do vaso (mm)
BCM1634K	16-32
BCL2645K	26-42



Consulte as Instruções de Uso
eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de Uso* no Web site eifu.goremedical.com para uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precaução e contraindicações aplicáveis para os mercados onde este produto está disponível. **Rx Only**

Nome comercial: GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath. Número do registro na ANVISA: 80067930039

Nome comercial: GORE® TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930048

Nome comercial: GORE® TAG® Conformable Thoracic Stent Graft. Número do registro na ANVISA: 80067930045

Nome comercial: GORE® Tri-Lobe Balloon Catheter. Número do registro na ANVISA: 80067930022

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas mencionadas são marcas comerciais de uma empresa do grupo de afiliadas da Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs "*Together, improving life*" são marcas registradas de uma empresa da Gore. 26AR1037-PT01 MARÇO DE 2026 MAT-0790-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia-Pacífico +65 67332882
Austrália/Nova Zelândia 1800 680 424
Europa 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

