



Gore人工血管 カタログ

ゴアテックス® ストレッチグラフト
GORE-TEX® STRETCH
Vascular Graft

ゴア® インテリング®
GORE® INTERING®
Vascular Graft

ゴアテックス® バスキュラーグラフト
GORE-TEX®
Vascular Graft




Together, improving life

Gore人工血管の特徴


※品番により該当する特徴が異なります

ストレッチ性

ストレッチ性を有する品番は、ハンドリングが容易で無理のない吻合部形成が可能となるよう設計されています。

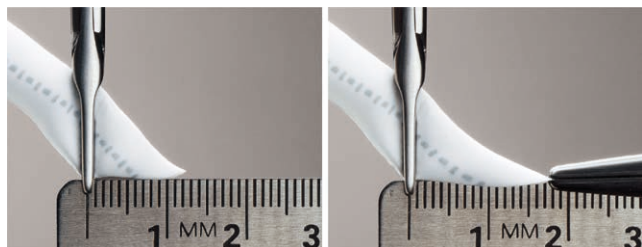


ストレッチ性を有する品番は、縮んだ状態で包装されています。ご使用前に下記図のように適切な強度で伸展を行ってからご使用ください。

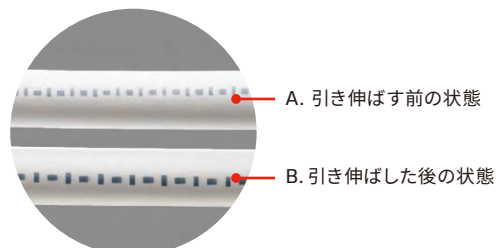


補強膜

全てのGore人工血管は、耐拡張性および縫合糸保持力の向上を期待した補強膜を有しています。

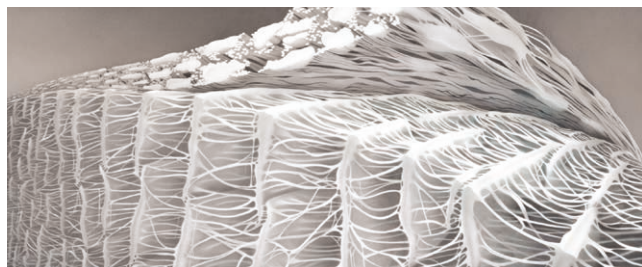

スタンダードウォール & シンウォール


Gore人工血管には、スタンダードウォールとシンウォールタイプがあります。シンウォールタイプは壁厚を薄くし、ハンドリング性の向上を意図したデザインとなっています。

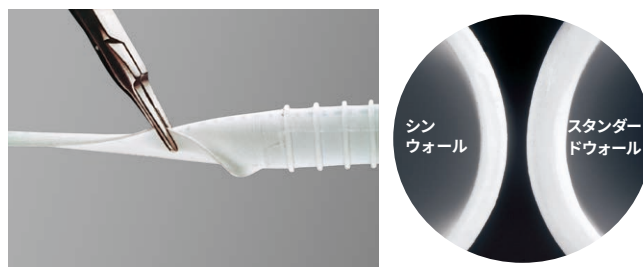

リングサポート

リムーバブルリング付

リムーバブルリングは補強膜を損傷することなく、容易に除去することができるようデザインされています。また、ひとつずつ独立しているため、最適な部分のみリングを外すことが可能です。

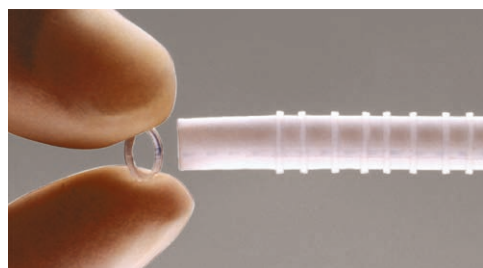

壁内一体型

サポート部がグラフト壁内に一体化された人工血管です。リングを取り外すことなく吻合や穿刺が可能で、吻合部を含むグラフト内腔を保持できるようデザインされています。



ゴアテックス® ストレッチグラフト リングサポート付

- ストレッチ性によりハンドリングが容易で、無理のない吻合部形成が可能
- リングサポートによりキンクや潰れを軽減

品番	内径(mm)	全長(cm)	リング長(cm)	壁タイプ
SRGTWR-054030L*	5	40	30	シンウォール

* 本品のリングはリムーバブルタイプです。
販売名：ゴアテックス®EPTFEグラフト リング付 承認番号：16200BZY01218000 一般的名称：中心循環系人工血管

ゴアテックス® ストレッチグラフト リングサポートなし


- ストレッチ性によりハンドリングが容易で、無理のない吻合部形成が可能
- 小口径から大口径までのサイズラインナップ

品番	内径(mm)	全長(cm)	壁タイプ
SGTW-064L	6	40	シンウォール
SGTW-084L	8	40	シンウォール
SGTW-104L	10	40	シンウォール
SGS-054L	5	40	スタンダードウォール
SGS-064L	6	40	スタンダードウォール
SGS-123L	12	30	スタンダードウォール
SGS-143L	14	30	スタンダードウォール
SGS-163L	16	30	スタンダードウォール
SGS-183L	18	30	スタンダードウォール
SGS-203L	20	30	スタンダードウォール
SGS-223L	22	30	スタンダードウォール
SGS-243L	24	30	スタンダードウォール

販売名：ゴアテックス®EPTFEグラフトII 承認番号：15900BZY00509000 一般的名称：中心循環系人工血管

ゴア® インテリング®

- サポートが壁内に一体化された人工血管で、リングを外すことなく吻合や穿刺が可能
- ストレッチ性によりハンドリングが容易で、無理のない吻合部形成が可能

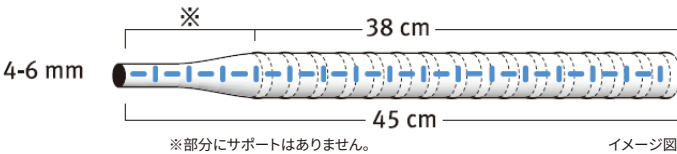

品番	内径(mm)	全長(cm)	リング長(cm)	壁タイプ
ISRT-4645L†	4-6	45	38	スタンダードウォール

† 血液透析バスキュラーアクセス用ショートテーパータイプ
販売名：ゴア® インテリング® 承認番号：21700BZY00498000 一般的名称：非中心循環系人工血管

ゴアテックス® バスキュラーグラフト リングサポート付

- リングサポートによりキンクや潰れを軽減
- 大口径のサイズラインナップ

※本品はストレッチ性を有していません

品番	内径(mm)	全長(cm)	リング長(cm)	壁タイプ
RGTWR-107070L [†]	10	70	70	シンウォール
GR-123030 [§]	12	30	30	スタンダードウォール
GR-143030 [§]	14	30	30	スタンダードウォール
GR-163030 [§]	16	30	30	スタンダードウォール
GR-202020 [§]	20	20	20	スタンダードウォール

[†] 本品のリングはリムーバブルタイプです。
[§] 本品のリングはリムーバブルタイプではありません。

販売名：ゴアテックス®EPTFEグラフト リング付 承認番号：16200BZY01218000 一般的名称：中心循環系人工血管

ゴアテックス® バスキュラーグラフト リングサポートなし

※本品はストレッチ性を有していません

品番	内径(mm)	全長(cm)	壁タイプ
GS-044L	4	40	スタンダードウォール

販売名：ゴアテックス®EPTFEグラフトII 承認番号：15900BZY00509000 一般的名称：中心循環系人工血管

「添文ナビ」アプリで電子添付文書をご参照ください



販売名：ゴアテックス®EPTFEグラフト リング付
承認番号：16200BZY01218000
一般的名称：中心循環系人工血管



販売名：ゴアテックス®EPTFEグラフトII
承認番号：15900BZY00509000
一般的名称：中心循環系人工血管



販売名：ゴア® インテリング®
承認番号：21700BZY00498000
一般的名称：非中心循環系人工血管

本資料は医療関係者向けです。それ以外の方への再配布はご遠慮ください。全ての禁忌、警告、使用上の注意および有害事象に関する詳細は電子化された添付文書(電子添文)を必ずご参照ください。
© 2025 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 無断転載・複製を禁じます。記載の商標は、Goreグループの関連会社または各権利者の商標です。
“Together, improving life”および記載のデザイン(ロゴ)は、Goreの商標です。 25PL3028-JA01 AUGUST 2025

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

